



介護保険レンタル対象品


車いす用スロープ

段ない・ス

先端可動タイプ



従来タイプ

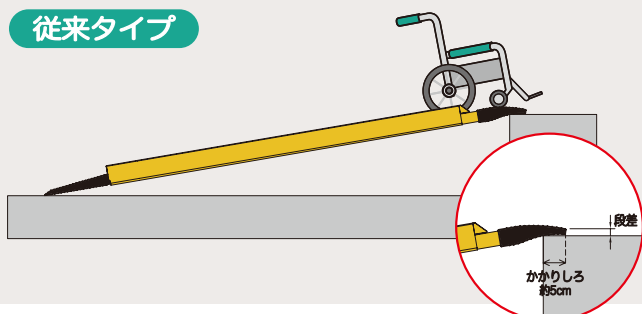

先端が可動するため、乗り降りスムーズ♪


スロープ先端が可動するため、設置角度に関わらず、上端部を地面にピッタリと設置でき、また、かかりしろが多く、より安心して走行できます。
乗り降り時の衝撃を段差を格段に抑えられ、スムーズに走行できます。



設置が簡単—上側・下側を確認しなくても大丈夫—

従来タイプですと、先端の形状が上側と下側で異なりますので、形状を確認してから設置しないといけません。
先端可動タイプは、先端の形状が上下とも同じで、かつ可動しますので、どちらを上にしても設置することができます。

先端可動タイプ

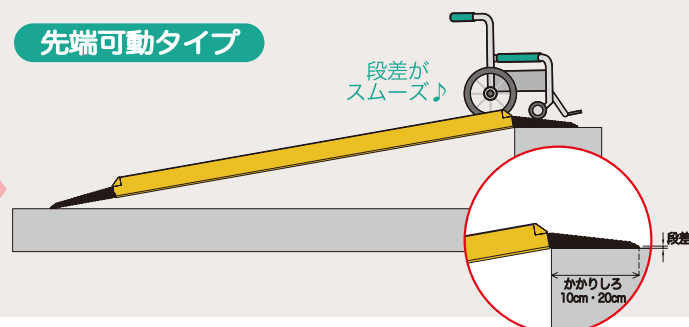


らくらくメンテナンス

アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。

安心してお使いいただける
アルミエッジ

スロープ両サイドのアルミエッジが走行を安全にサポートします。

PAT.P 特許出願中

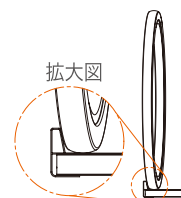

車いす用スロープ

段ない・ス


先端可動タイプ

らくらく
乗り降り

快適走行

安心設計

●サイズ・規格

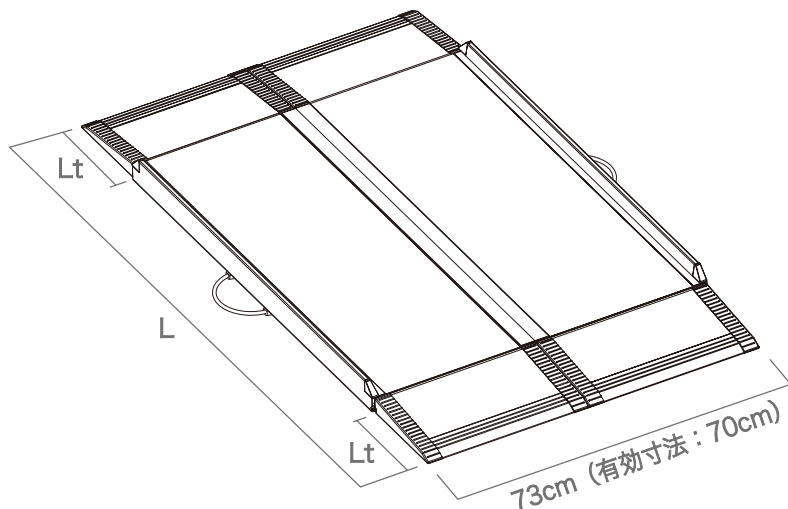

◎耐荷重：300kg

◎材 質：FRP
アルミ
合成ゴム

品 名	品番コード	TAISコード	長さ (L)	長さ (Lt)	厚さ (T)	重 量	定価(税抜)
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ 650	634-010	01235-000119	65cm	10cm	2cm	約5.5kg	64,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ 800	634-020	01235-000120	80cm	10cm	2cm	約6.5kg	72,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ1000	634-030	01235-000121	100cm	10cm	2cm	約7.5kg	83,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ1250	634-040	01235-000122	125cm	10cm	2cm	約9.0kg	107,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ1500	634-050	01235-000123	150cm	10cm	2cm	約10.0kg	118,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ1750	634-060	01235-000124	175cm	20cm	3cm	約13.0kg	125,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ2000	634-070	01235-000125	200cm	20cm	3cm	約14.5kg	136,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ2400	634-080	01235-000126	240cm	20cm	3cm	約16.5kg	230,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ2600	634-100	01235-000160	260cm	20cm	3cm	約19.0kg	250,000円
車いす用スロープ段ない・ス 先端可動タイプ2800	634-090	01235-000127	280cm	20cm	3cm	約21.5kg	270,000円

～使用する段差の目安～

品 名	自力で走行 (勾配約5°)	介助者同伴 (勾配約10°)	最大適応段差 (勾配約15°)
先端可動タイプ 650	6cm	11cm	17cm
先端可動タイプ 800	7cm	14cm	21cm
先端可動タイプ1000	9cm	17cm	26cm
先端可動タイプ1250	11cm	22cm	32cm
先端可動タイプ1500	13cm	26cm	39cm
先端可動タイプ1750	15cm	30cm	45cm
先端可動タイプ2000	17cm	35cm	52cm
先端可動タイプ2400	21cm	42cm	62cm
先端可動タイプ2600	23cm	46cm	68cm
先端可動タイプ2800	25cm	49cm	72cm

●ご使用時の注意



スロープを広げて、「△注意シール」を目印に、
端部を完全に乗せて設置し、安全を確認して
からご使用ください。



・製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。
・予告なく価格及び仕様を変更する場合がございます。

(販売店)

■ 製 造 元



<http://www.sk-shikoku.co.jp>



■本社工場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL: (0879) 42-1111 (代) / FAX: (0879) 42-1112

■東京支店

〒130-0012 東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL: (03) 6847-9371 (代) / FAX: (03) 6847-9372

■九州支店

〒811-2243 福岡県糟屋郡志免町志免東3-7-10
TEL: (092) 692-1450 / FAX: (092) 692-1451

■中部営業所

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井4-10-1 アクティブ青山C号
TEL: (0586) 76-3451 / FAX: (0586) 76-3452