





BS 桜 ステップ台

取扱説明書 保証書

このたびは、「BS 桜 ステップ台」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになれる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

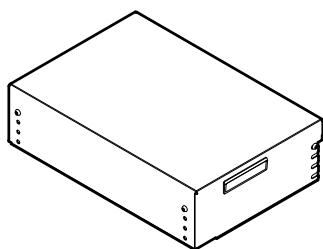

633-330

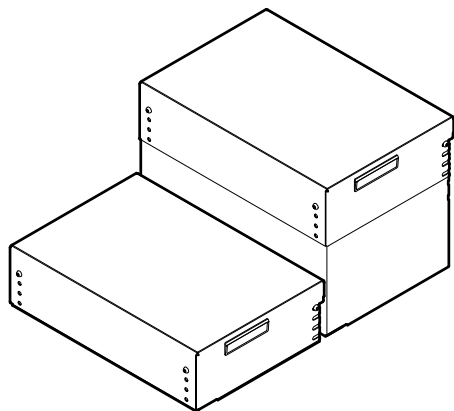

633-331

も く じ

使用上のご注意	1
設置・保管上のご注意	1
仕様	2
各部の名称・材質	3
組立手順	3～5
お手入れ方法	6
保証書	7

用 途	BS 桜専用のステップ台です。 ステップ台を取り付けることで、上がりかまちなどの段差の上り下りを補助します。 その他の用途には使用しないでください。
特 徴	高さが20mm間隔・4段階で調節できます。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



- ・ 本製品は、BS桜専用のステップ台です。他の製品に取り付けて使用しないでください。
- ・ 段差の上り下りを補助する以外の用途で使用しないでください。
- ・ 必ずステップ台がベースプレートに固定された状態で使用してください。
- ・ ステップ台が濡れた状態で使用する場合は、滑りやすいのでご注意ください。
- ・ 保護マットを貼り付けていない状態で使用しないでください。
- ・ 子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。
- ・ 勢いよく飛び乗らないでください。
- ・ 製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。
- ・ 改造や加工をしないでください。
- ・ ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。
ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。
ご使用の際は介助者が付き添って使用することをお勧めします。身体の状態に合わない場合は直ちにご使用を中止してください。
- ・ 予測できない行動をとる、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。
ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、
場合によっては命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。
自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。



- ・ 保護マットに砂利、雪などがいない状態で使用してください。
- ・ 介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

設置・保管上のご注意



- ・ 弊社製品と他社製品を組み合わせ使用しないでください。
- ・ 平らで水平な場所に設置してください。
- ・ 設置後の安定性をよくご確認ください。
- ・ 設置後、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。
- ・ 定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。




- ・ 結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- ・ 破損、変形などの原因となりますので、以下のような場所への設置は避けてください。
 - ・ 冷暖房器による冷気や暖気が直接当たる場所
 - ・ 過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
 - ・ 高温、多湿、低温、乾燥した場所
 - ・ ほこり、煙、塩分、硫黄分、腐食性物質などの多い場所
 - ・ 換気の悪い場所
 - ・ 振動や衝撃のある場所
- ・ ご使用になられる環境により、サビが発生する場合がありますので注意してください。

仕様

品 名	品番コード	TAISコード	重 量
B S 桜ステップ台 1段	633-330	01235-000284	約5.2kg

※最大使用者体重 100kg

【単位:mm】

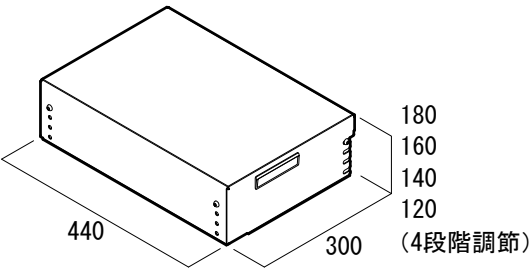


内 訳	
部 材 の 名 称	入数
天板 1段	1台
ベース 1段	1台
保護マット	1枚
高さ調節用ねじ (六角穴付きボタンボルト M6x10mm)	2本
天板固定用ねじ (六角穴付きボタンボルト ガイド付 M6x12mm)	2本
付 属 品	
ステップ台固定用ねじ (六角穴付きボタンボルト M6x10mm)	4本
六角レンチ 対辺4mm	1本

品 名	品番コード	TAISコード	重 量
B S 桜ステップ台 2段	633-331	01235-000285	約13.0kg

※上記品番コードは1段と2段のセットとなっています。


※最大使用者体重 100kg

【単位:mm】

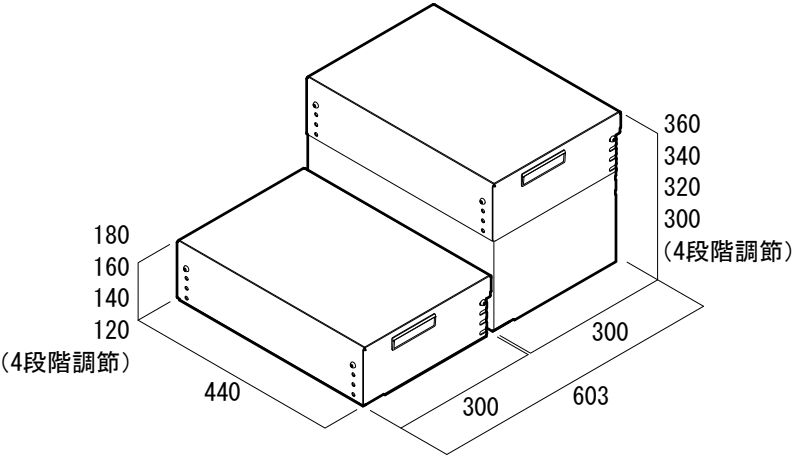

内 訳	
部 材 の 名 称	入数
天板 1段	1台
ベース 1段	1台
天板 2段	1台
ベース 2段	1台
保護マット	2枚
高さ調節用ねじ (六角穴付きボタンボルト M6x10mm)	4本
天板固定用ねじ (六角穴付きボタンボルト ガイド付 M6x12mm)	4本
付 属 品	
ステップ台固定用ねじ (六角穴付きボタンボルト M6x10mm)	8本
六角レンチ 対辺4mm	1本

各部の名称・材質

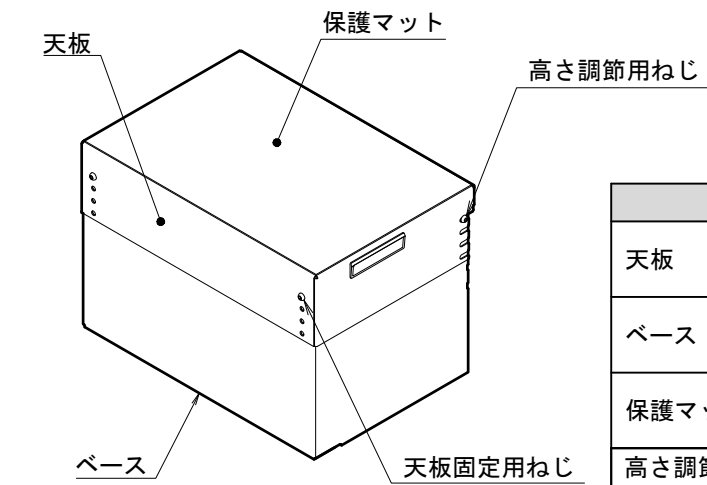

付 属 品	
 ステップ台 固定用ねじ	 六角レンチ 対辺4mm

部 材 の 名 称	材 質
天板	本体：ステンレス 取手：ABS
ベース	ステンレス
保護マット	PVC
高さ調節用ねじ (六角穴付きボタンスクリュー M6x10mm)	 ステンレス
天板固定用ねじ (六角穴付きボタンスクリュー ガイド付 M6x12mm)	 ステンレス
付 属 品	材 質
ステップ台固定用ねじ (六角穴付きボタンスクリュー M6x10mm)	ステンレス
六角レンチ 対辺4mm	スチール

組立手順

組立上のご注意




注意

- ・組み立て、高さ調節は納入業者の方に行っていただくようお願いします。
- ・ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。
- ・六角レンチは六角穴に対してまっすぐ差し込んでください。
- ・六角レンチを回す時は、力が強すぎるとねじ頭が破損するおそれがあります。

1. 天板の取り外し

六角レンチ（対辺4mm）で、天板固定用ねじ（天板1台につき2ヶ所）を取り外し、高さ調節用ねじ（ベース1台につき2ヶ所）を緩めてください。
天板の取手を利用して、手前にスライドさせながら、天板をベースから取り外してください。

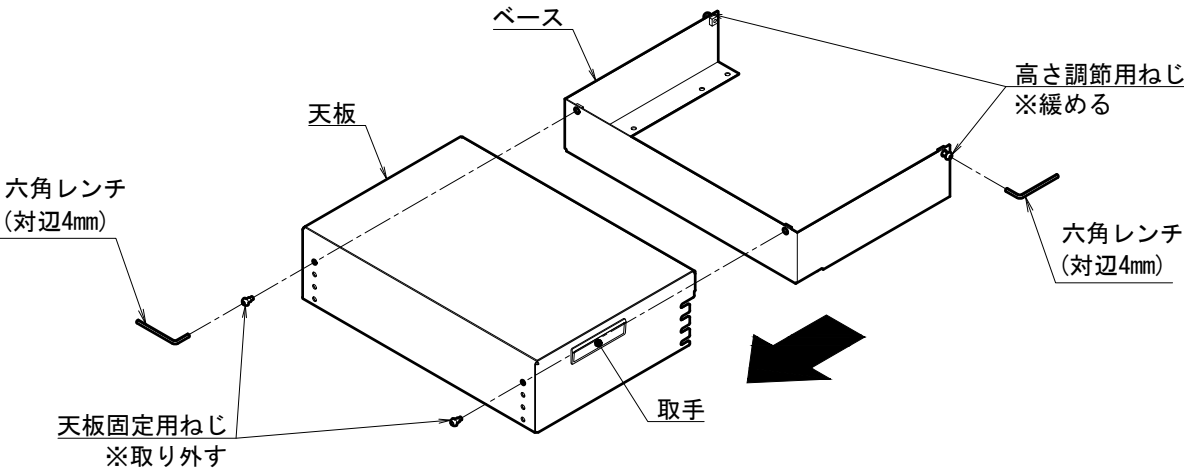


組立手順

2. ベースの取り付け

ベースの取り付け穴とBS桜のベースプレートの穴位置を確認し、ステップ台固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で締め付けてください。(ベース1台につき4ヶ所)

【ステップ台取付位置】

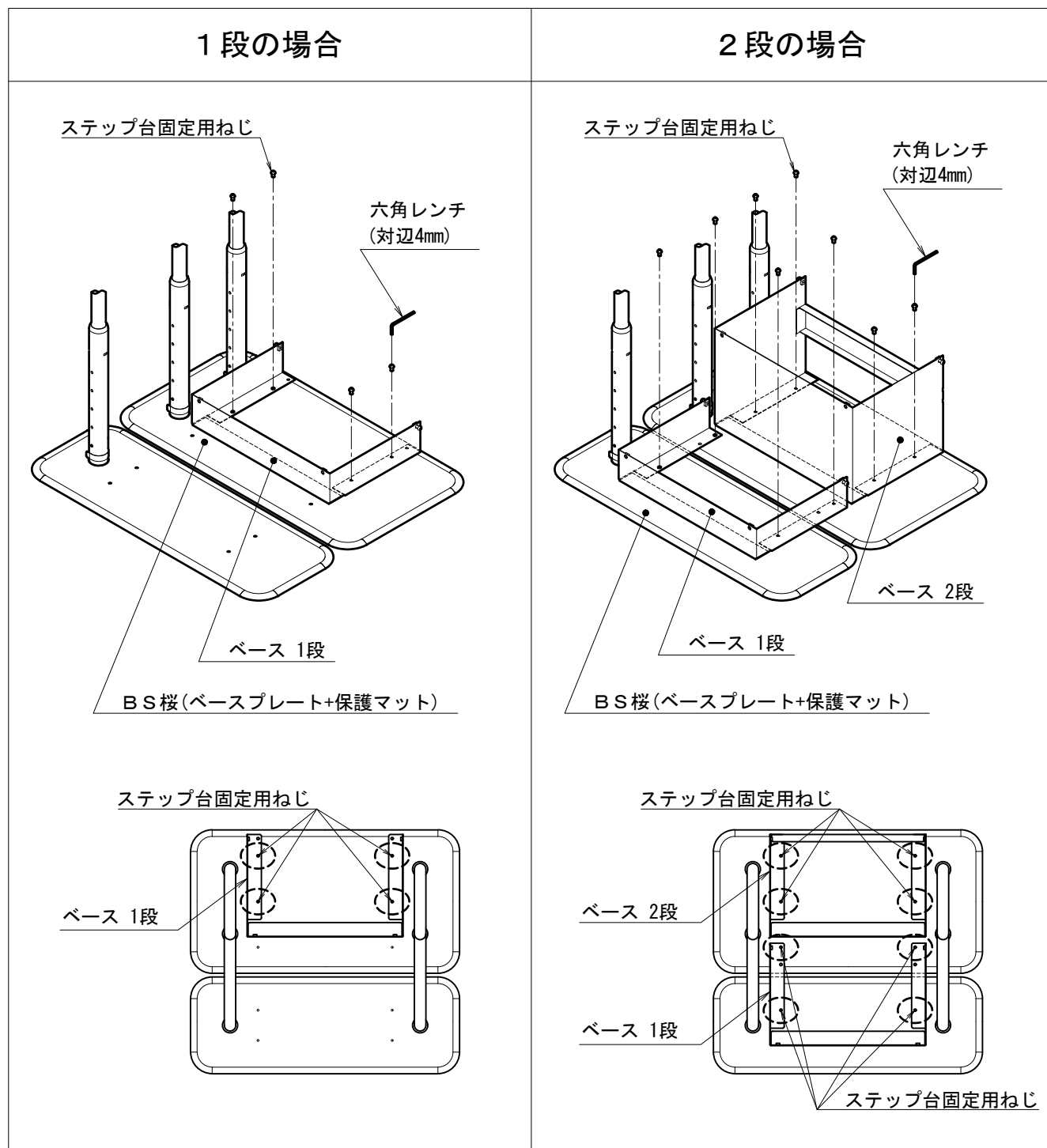

⚠ 注意


BS桜のベースプレートに保護マットが付いた状態で、ベースを取り付けてください。

組立手順

3. ステップ台の高さ調節


ステップ台の高さは20mm間隔・4段階で位置決めができます。

高さ表示シールを参考にして決めた高さの切り欠きに、高さ調節用ねじが引っかかるように天板を手前から差し込んでください。

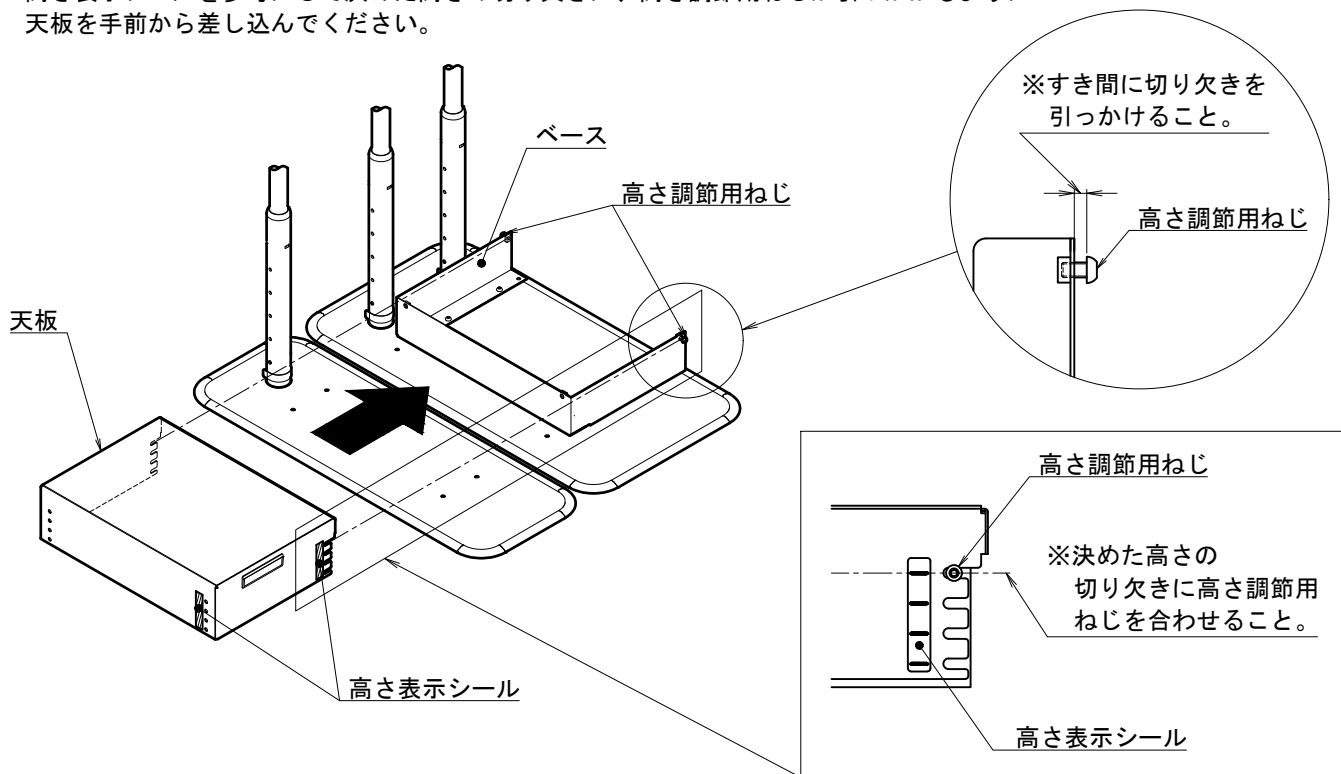

4. 天板の取り付け

六角レンチ（対辺4mm）で、天板固定用ねじ（天板1台につき2ヶ所）を締め付けてから、高さ調節用ねじ（ベース1台につき2ヶ所）を締め付けてください。

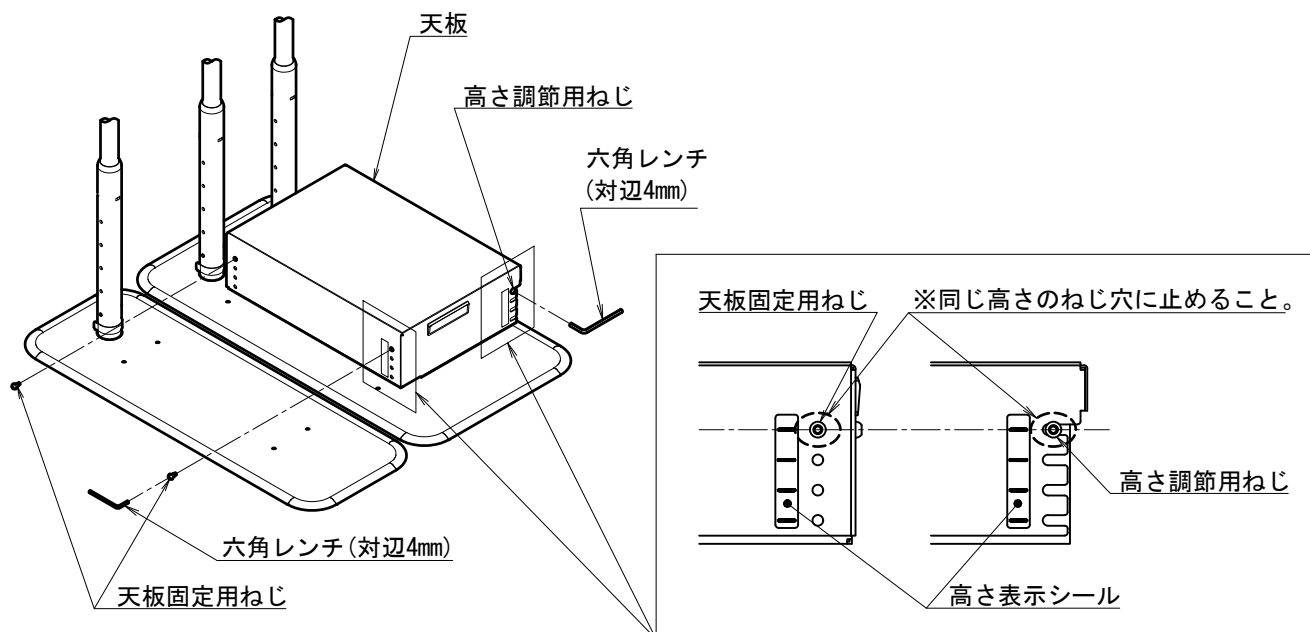

⚠ 注意

組立後、ガタつきや各部ねじの緩みのないことを必ず確認してください。
転倒の原因となるおそれがあります。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。

汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

保護マットを取り外して洗浄する場合は、両面テープを取り除いてから洗浄してください。

洗浄後は新しい両面テープ（別売）を使用してください。

⚠ 注意

下記の方法は、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

■消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。

アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。

⚠ 注意

下記の方法は、消毒に使用しないでください。

オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）

■点検

定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

⚠ 注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者または納入業者へご相談ください。

■保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。

⚠ 注意

高温多湿の場所で保管しますと、保護マット等の変形の原因となります。

保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理いたします。

- 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障又は損傷。
(本来の用途以外で使用了場合、耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
 - 弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
 - 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
 - お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
 - その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

＜個人情報の取扱いについて＞

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1 年間	ご住所 〒
品 名		
販売店		ご芳名
		TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・取扱などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

099-5002



株式会社 シコク

本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>