

このたびは、「アプローチ手すり 微笑の桔梗」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の使い方・安全上の注意事項について記載しています。

ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

	左の記号はしてはいけない「禁止」内容です。		左の記号は必ず実行して頂く「強制」内容です。
---	-----------------------	---	------------------------

 警告			
	転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子などや断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。		使用者が介助を必要とする場合は、必ず介助者が付き添ってください。 転倒し、けがの原因になります。
	一般住宅に取り付ける歩行補助手すり以外では使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。		

 注意			
	使用中にねじのゆるみやガタツキが発生した場合は直ちに使用を中止して取り付け工事店に修理を依頼してください。 取付が不安定となり、けがの原因になります。		直接熱を掛けたり、熱器具を近くで使用しないでください。 火災や変形、破損の原因になります。
	手すりに立ったり、座ったりなど手すりとしての用途以外には、使用しないでください。 けがや破損の原因になります。		強い衝撃が加わるような使用はしないでください。 けがや破損の原因になります。
			改造や分解をしないでください。 けがや破損の原因になります。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。

汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

注意

下記のは、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

樹脂部品では変色・割れ・光沢消失、金属部品では、変色・さびが発生し、商品が破損するおそれがあります。

■点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

17.04



株式会社

シコク

本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<http://www.sk-shikoku.co.jp>