



この度は、「玄関用ベストサポート手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には、製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。


用途	<p>上がりかまちの上り下りを補助する、据え置きタイプの手すりです。</p>
製品	<p style="text-align: center;"><b>上がりかまち高さ 0～20cm対応</b></p> <p>※[ ]内の寸法は、ベースプレートコンパクトタイプを示します。</p> <p style="text-align: center;"><b>上がりかまち高さ 20～40cm対応</b></p> <p>※[ ]内の寸法は、ベースプレートコンパクトタイプを示します。</p>
特徴	<p>以下のタイプからお選びいただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手すり：片手すり / 両手すり</li> <li>・上がりかまちの高さ対応：0～20cmタイプ / 20～40cmタイプ</li> <li>・ベースプレートサイズ：標準タイプ / コンパクトタイプ</li> </ul> <p>2.5cm間隔・5段階（最大10cm）で手すりの高さが調節できます。</p>

# 部品


組み立てを行う前に、部品の有無を確認してください。

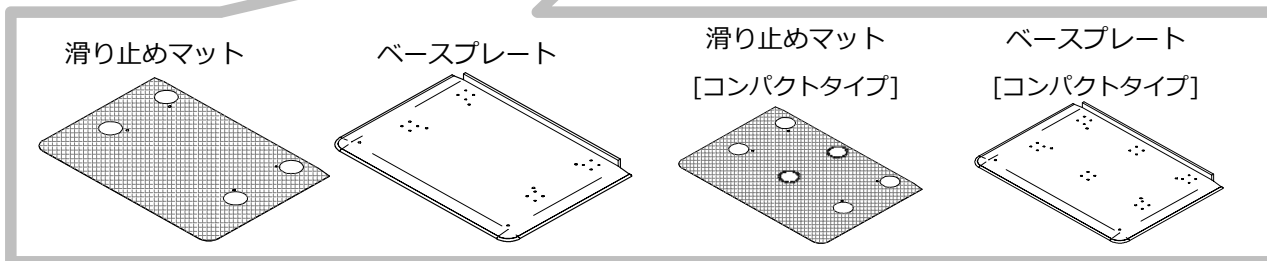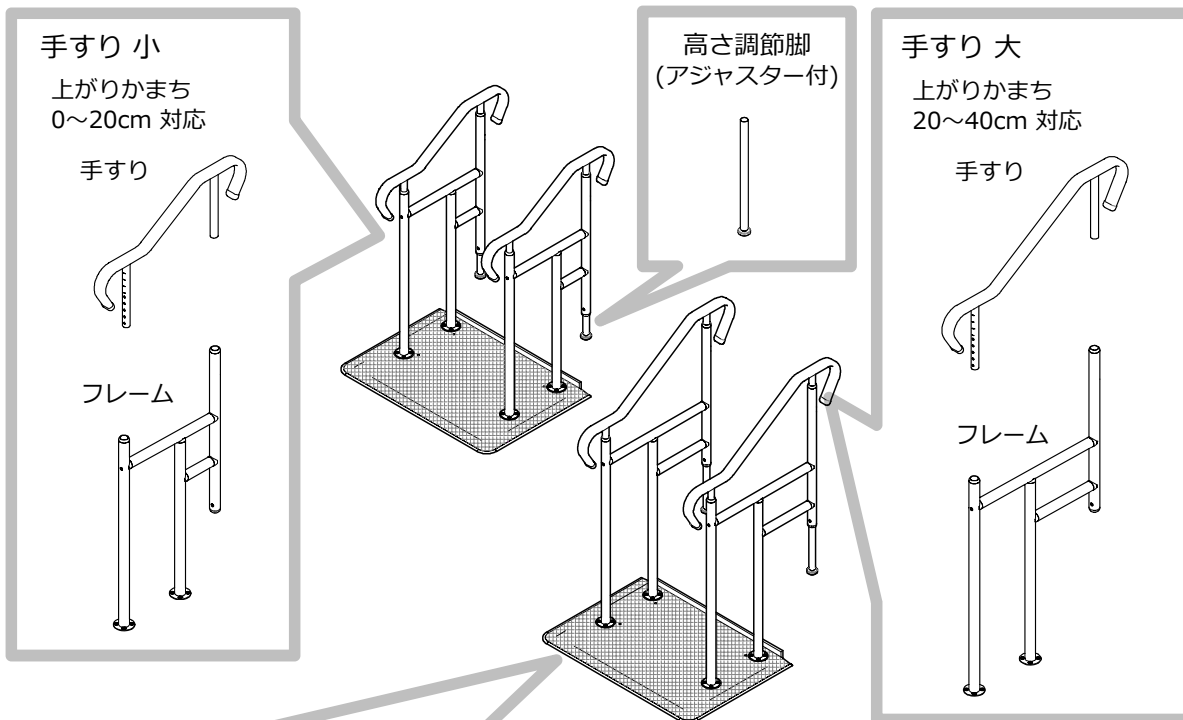

## 付属品 (手すり取付用) ※手すり1本につき1セットになります。

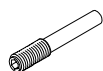

手すり高さ調節ねじ  
(M5x32)  
材質: ステンレス  
入数: 2本

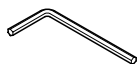

六角レンチ (2.5mm)  
材質: スチール (黒染)  
入数: 1本



六角レンチ (4mm)  
材質: スチール (黒染)  
入数: 1本



手すり固定ねじ  
(M6x12)  
材質: ステンレス  
入数: 8本

## 付属品 (製品用) ※[ ]内の数量は、ベースプレートコンパクトタイプを示します。




アジャスターねじ  
(M8x8)  
材質: ステンレス  
入数: 2本



六角レンチ (4mm)  
材質: スチール (黒染)  
入数: 1本



マット用栓シール  
(75mm×100mm)  
材質: アルミ箔+粘着テープ  
入数: 2枚 [4枚]

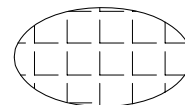

マット用栓  
(Φ72)  
材質: 樹脂  
入数: 2枚 [4枚]

# 仕様

## 玄関用ベストサポート手すり 1-1

品番コード：626-011  
TAISコード：01235-000019  
重さ：約27.1kg



## 玄関用ベストサポート手すり 3-1

[ベースプレートコンパクトタイプ]  
品番コード：626-031  
TAISコード：01235-000198  
重さ：約21.5kg



部材の名称		材質	数量	
			1-1	3-1
手すり 小	手すり	被膜樹脂	1本	1本
	フレーム	ステンレス	1本	1本
高さ調節脚		ステンレス	1本	1本
ベースプレート		ステンレス	1枚(大)	1枚(小)
滑り止めマット		樹脂	1枚(大)	1枚(小)
付属品 (手すり取付用)			1セット	1セット
付属品 (製品用)			1セット	1セット

## 玄関用ベストサポート手すり 1-2

品番コード：626-012  
TAISコード：01235-000020  
重さ：約31.8kg



## 玄関用ベストサポート手すり 3-2

[ベースプレートコンパクトタイプ]  
品番コード：626-032  
TAISコード：01235-000199  
重さ：約26.4kg



部材の名称		材質	数量	
			1-2	3-2
手すり 小	手すり	被膜樹脂	2本	2本
	フレーム	ステンレス	2本	2本
高さ調節脚		ステンレス	2本	2本
ベースプレート		ステンレス	1枚(大)	1枚(小)
滑り止めマット		樹脂	1枚(大)	1枚(小)
付属品 (手すり取付用)			2セット	2セット
付属品 (製品用)			1セット	1セット

## 玄関用ベストサポート手すり 2-1

品番コード：626-021  
TAISコード：01235-000021  
重さ：約28.5kg



## 玄関用ベストサポート手すり 4-1

[ベースプレートコンパクトタイプ]  
品番コード：626-041  
TAISコード：01235-000200  
重さ：約21.8kg



部材の名称		材質	数量	
			2-1	4-1
手すり 大	手すり	被膜樹脂	1本	1本
	フレーム	ステンレス	1本	1本
高さ調節脚		ステンレス	1本	1本
ベースプレート		ステンレス	1枚(大)	1枚(小)
滑り止めマット		樹脂	1枚(大)	1枚(小)
付属品 (手すり取付用)			1セット	1セット
付属品 (製品用)			1セット	1セット

## 玄関用ベストサポート手すり 2-2

品番コード：626-022  
TAISコード：01235-000022  
重さ：約34.6kg



## 玄関用ベストサポート手すり 4-2

[ベースプレートコンパクトタイプ]  
品番コード：626-042  
TAISコード：01235-000201  
重さ：約27.0kg




部材の名称		材質	数量	
			2-2	4-2
手すり 大	手すり	被膜樹脂	2本	2本
	フレーム	ステンレス	2本	2本
高さ調節脚		ステンレス	2本	2本
ベースプレート		ステンレス	1枚(大)	1枚(小)
滑り止めマット		樹脂	1枚(大)	1枚(小)
付属品 (手すり取付用)			2セット	2セット
付属品 (製品用)			1セット	1セット

## 「マット用栓」使用方法

「マット用栓」と「マット用栓シール」は、手すりを1本のみ使用する場合に、右図のように滑り止めマットの穴をふさぐ部品です。

手すりを取り付けない方の穴を選び、「マット用栓シール」を滑り止めマットの裏側から貼り付けます。その後、滑り止めマットの上から「マット用栓」を貼り付けて穴をふさいでください。

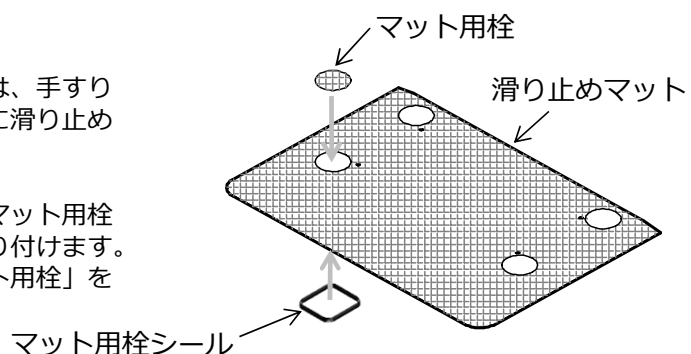

# 組立方法


## 組立上のご注意



- ・組み立て、高さ調整は納入業者の方に行ってください。
- ・ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。
- ・六角レンチは六角頭に対してまっすぐ差し込んでください。
- ・六角レンチを回す時に、力が強すぎるとねじ頭が破損する恐れがあります。


### ① 滑り止めマット装着

滑り止めマット裏側のマグネットを利用して、ベースプレートに貼り付けてください。

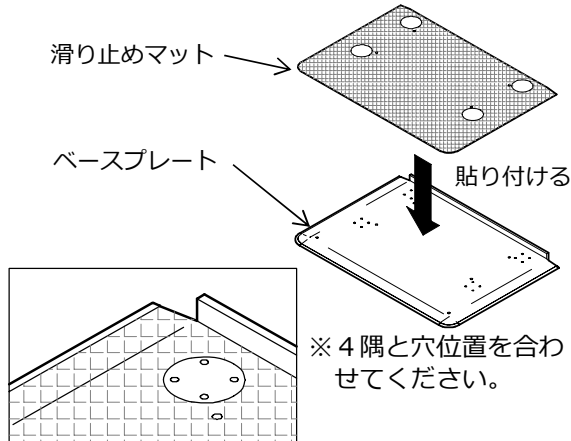


### ② 高さ調整脚差し込み

高さ調整脚を手すり部に差し込んでください。

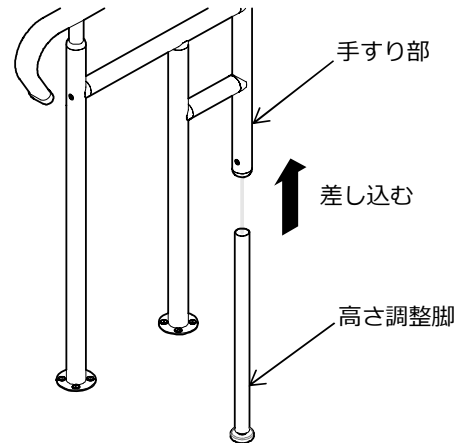


### ③ 高さ調整脚仮止め

あがりかまちに当たらない高さまで高さ調整脚を上げ、高さ調整脚固定ねじを緩く締めて仮止めの状態にしてください。

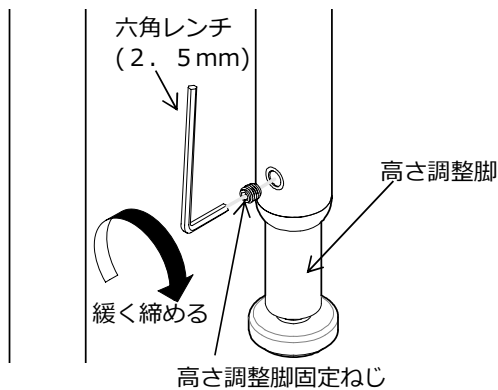


### ④ 手すり部取付

手すり部とベースプレートを、手すり固定ねじで固定してください。

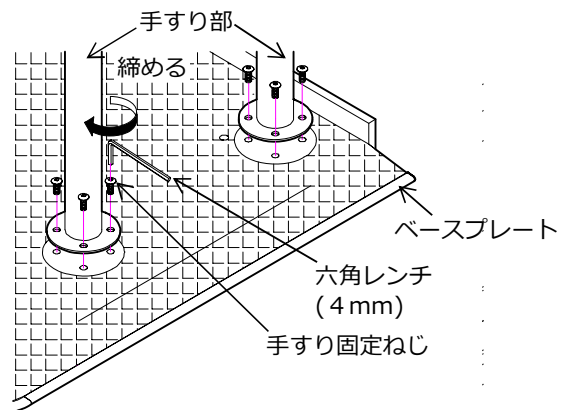


### ⑤ 片手すりの場合

滑り止めマットには手すりを取り付ける箇所に穴があいています。手すりを取り付けない箇所の穴をマット用栓でふさいでください。

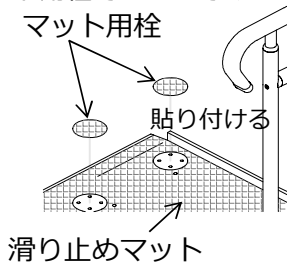


### 両手すりの場合

②～④の手順で、もう片方の手すりを取り付けてください。

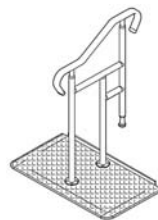


※ベースプレートコンパクトタイプの場合は、片手すりを中央に取り付けできます。

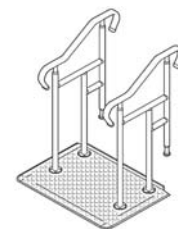


## ⑥ 製品の位置決め

本製品を玄関の上がりかまちに合わせて設置してください。

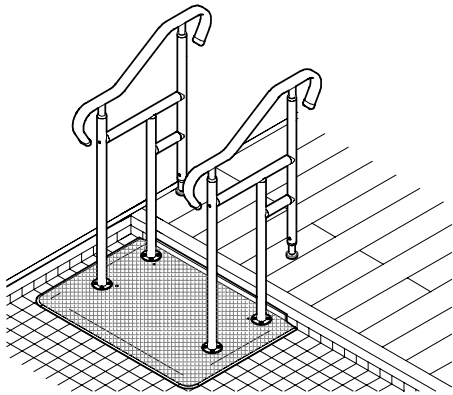


## ⑦ ベースプレートのがたつき修正

設置箇所が不安定な場合、滑り止めマットの端部をめくり、アジャスターねじを回してがたつきを調整します。（※固定後はベースプレートを動かさないでください。）

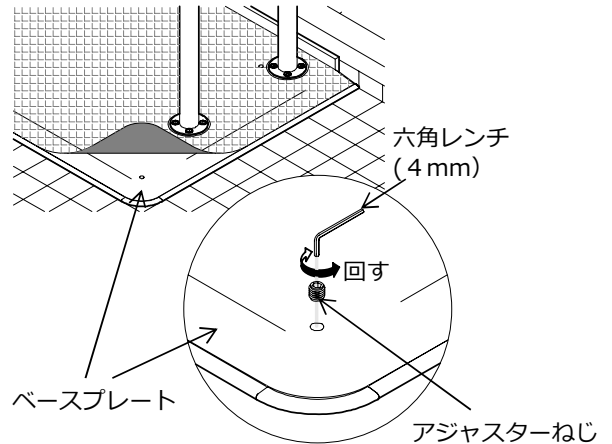


## ⑧ 高さ調整脚の調整

高さ調整脚固定ねじを少し緩めて、高さ調整脚を上がりかまちの高さに合わせてください。その後高さ調整脚固定ねじを締めてください。

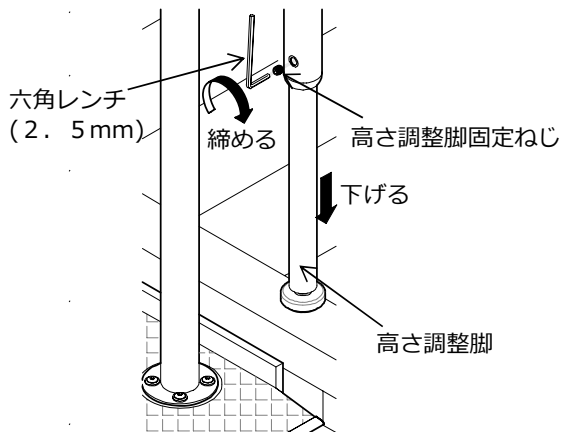


## ⑨ アジャスターの調整

高さ調整脚先端のアジャスターを、高さ調整脚が突っ張るまで回し固定してください。

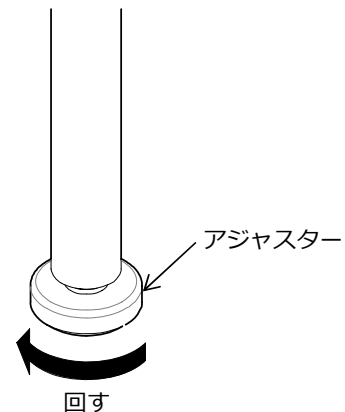

## ⑩ 手すり高さの調整

手すりをスライドさせ、傷防止キャップとラインを合わせるようにして手すり高さを調節し、手すり高さ調節ねじで固定してください。

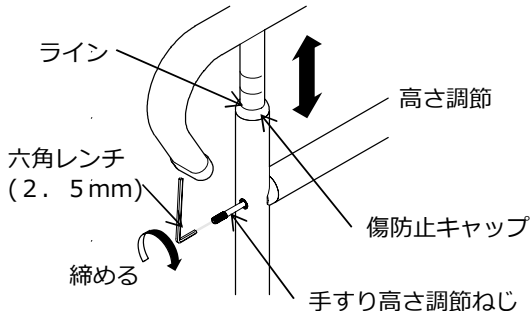


### ●注意

手すりのラインと傷防止キャップをしっかり合わせてください。手すりの穴と手すり高さ調節ねじがうまく合わず、ねじが斜めに入って破損する恐れがあります。

## ⑪ 安全の確認

製品がしっかりと固定されていることを確認してご使用ください。

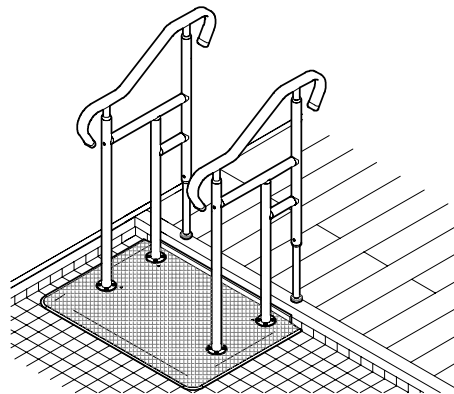

※収納する場合は組立手順と逆の操作をしてください。

## 保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。  
高温多湿の場所で保管しますと、変色、変形やジョイント部が外れる原因となります。

## お手入れの方法

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。  
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。



警告

以下のものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

製品を傷つけるものを使用しないでください。  
変色、劣化の原因になり製品が破損するおそれがあります。

## 消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。  
アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。



警告


以下のものは使用しないでください。

- ・オゾンガス
- ・ホルムアルデヒドガス

## オプションのご案内

### 玄関台

「玄関用ベストサポート手すり」と併用することで、より快適にお使いいただけます。  
天板に滑り止め加工を施しています。

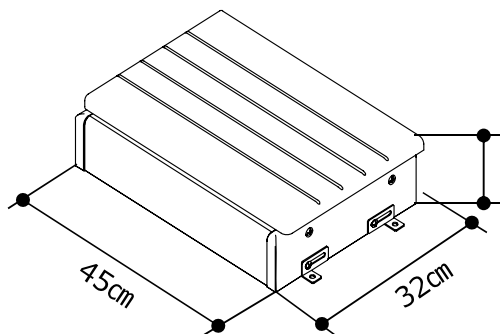

2タイプからお選びいただき、それぞれ  
3段階の調節が可能です。

ロータイプ : 11cm - 13.5cm - 16cm

ハイタイプ : 15cm - 17.5cm - 20cm

材質 : 天然木

重量 : ロータイプ 約4.2kg



ハイタイプ 約4.7kg

価格などの詳細につきましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。



※取り付け方はオプション箱に同梱しております。「玄関台 取扱説明書」をご覧ください。

## 使用上のご注意



ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	誤った取り扱いをすると、生命にかかわる傷害や物的損害を招くおそれがあります
 注意	誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招くおそれがあります

## 取扱い上のご注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"><li>・製品は、上がりかまちの上り下りを補助する、据え置きタイプの手すりです。それ以外の用途で使用しないでください。</li><li>・手すりを引き抜く方向や水平方向に力を加えないでください。</li><li>・ベースプレートや手すりが濡れた状態で使用しないでください。</li><li>・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。</li><li>・また、手すりフレームに頭や手足を入れないでください。</li><li>・製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。</li><li>・改造や加工をしないでください。</li></ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・移動させる場合は手すりを持たないでください。</li><li>・結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。</li><li>・定期的に点検を行い、ガタつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。</li><li>・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の屋内で保管してください。</li><li>・アジャスターねじを使用した後は、ベースプレートを動かさないでください。床面に傷が付く恐れがあります。</li></ul>

## 使用上のご注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"><li>・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。ご使用の際は介助者が付き添って使用することをお薦めします。身体の状態に合わない場合は直ちにご使用を中止してください。</li><li>・予測できない行動をとる、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください。 ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すりフレームの隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては命に関わる重大な事故につながる恐れがあります。自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。 ※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、直ちにご使用を中止し、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談し、適切な処置を受けてください。</li><li>・手すりの高さが上がりかまちから80cm～85cmになる範囲でご使用ください。</li></ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・平らで水平な場所に設置してください。</li><li>・固定式でないため設置後の安定性にご注意ください。</li><li>・支柱に貼り付けている警告ラベル、注意ラベルが見える方向で使用してください。</li><li>・ご使用の際は幼児が近付かないようにしてください。</li><li>・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。</li></ul>

# 保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。  
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理致します。

1. 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - 1) 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。  
(本来の用途以外で使用した場合、耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
  - 2) 弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
  - 3) 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
  - 4) 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
  - 5) お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
  - 6) その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
  - 7) 本保証書のご提示がない場合。
  - 8) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## <個人情報の取扱いについて>

- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。  
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1年間	ご住所 〒
品名		
販売店		ご芳名
		TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

18.07



株式会社 シコク

本 社 工 場 〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15  
TEL (0879)42-1111 (代) FAX (0879)42-1112

<http://www.sk-shikoku.co.jp>