


微笑


玄関台(木製)

取扱説明書・保証書

このたびは、「玄関台(木製)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

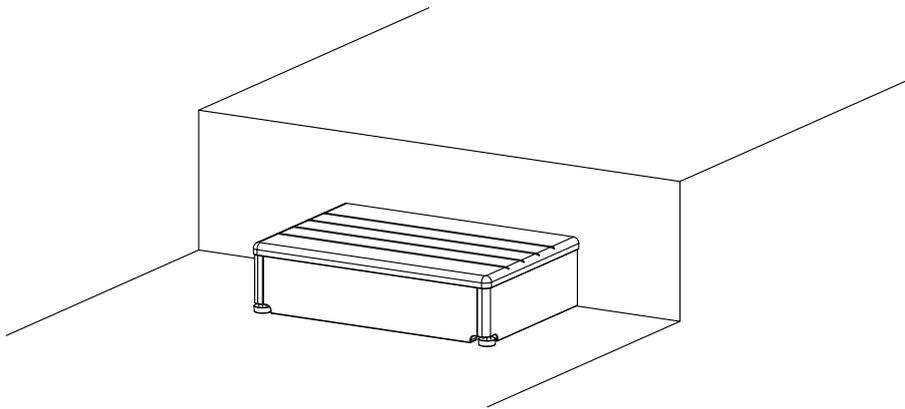

1段タイプ

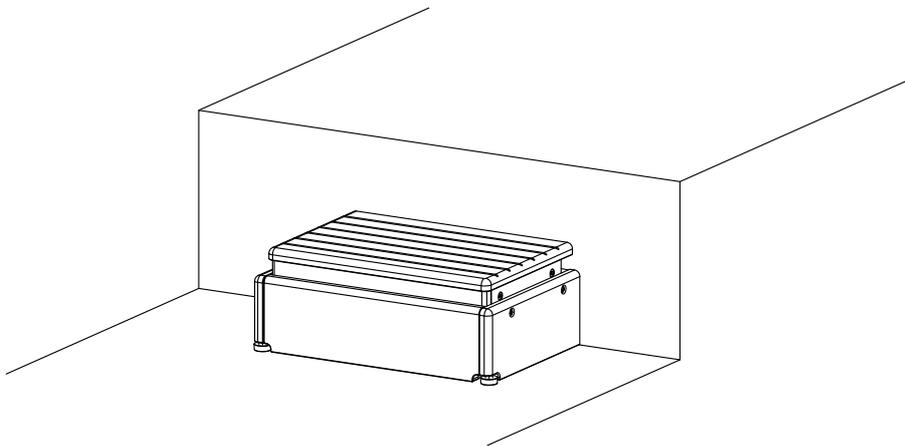

昇降タイプ

もくじ

安全上のご注意	1
仕様	1
各部のなまえ・材質	2
組立方法	3
取付方法	4~5
取外方法	6
お手入れ方法	6
保証書	7

用途	玄関台(木製)は、玄関フロアと上がりかまちとの段差を軽減し、昇降を容易にする為に使用する台です。 他の用途では絶対に使用しないでください。
特徴	1段タイプと昇降タイプがあり、2タイプともアジャスターで微調整ができるので、ガタツキを軽減し、安定した設置が可能になります。また、昇降タイプは玄関の段差に合わせて4段階で高さ調節ができるのが特徴です。 天面板にはすべり防止の塗装をしていますので、安心してお使いいただけます。

安全上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、ご理解のうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

取扱上のご注意

 警告	<ul style="list-style-type: none">・本製品は、玄関フロアと上がりかまちとの段差を軽減する際に使用する台です。それ以外の用途で使用しないでください。・段差や斜面への設置をしないで下さい。また、玄関台の下と天板面に玄関マットなどを敷いて使用しないでください。滑って、転倒やけがの原因になります。・濡れた状態、または、濡れた床面に設置しないでください。転倒の原因となります。・物置として使用しないでください。・勢いよく飛び乗らないでください。・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。・製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。・改造や加工、または分解をしないでください。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・結露した場合や濡れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。・定期的に点検を行い、ガタつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の屋内で保管してください。

使用上のご注意


 警告	<ul style="list-style-type: none">・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士などの専門員に相談してください。ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお薦めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。・予測できない行動をとる、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。ご使用される方の心身の状態や利用環境により、本体の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては重大な事故につながる恐れがあります。自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。
 注意	<ul style="list-style-type: none">・設置後、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

仕様


品名	タイプ	品番	サイズ	重量
45W-30	1段タイプ	640-010	幅45×奥行30×高さ12cm	約2.9kg
60W-30	1段タイプ	640-020	幅60×奥行30×高さ12cm	約3.7kg
60W-40	1段タイプ	640-030	幅60×奥行40×高さ12cm	約4.6kg
90W-40	1段タイプ	640-040	幅90×奥行40×高さ12cm	約6.4kg
昇降45W-30	昇降タイプ	640-050	幅45×奥行30×高さ15～22.5cm	約4.2kg
昇降60W-30	昇降タイプ	640-060	幅60×奥行30×高さ15～22.5cm	約5.0kg

※最大耐荷重 100kg


各部のなまえ・材質

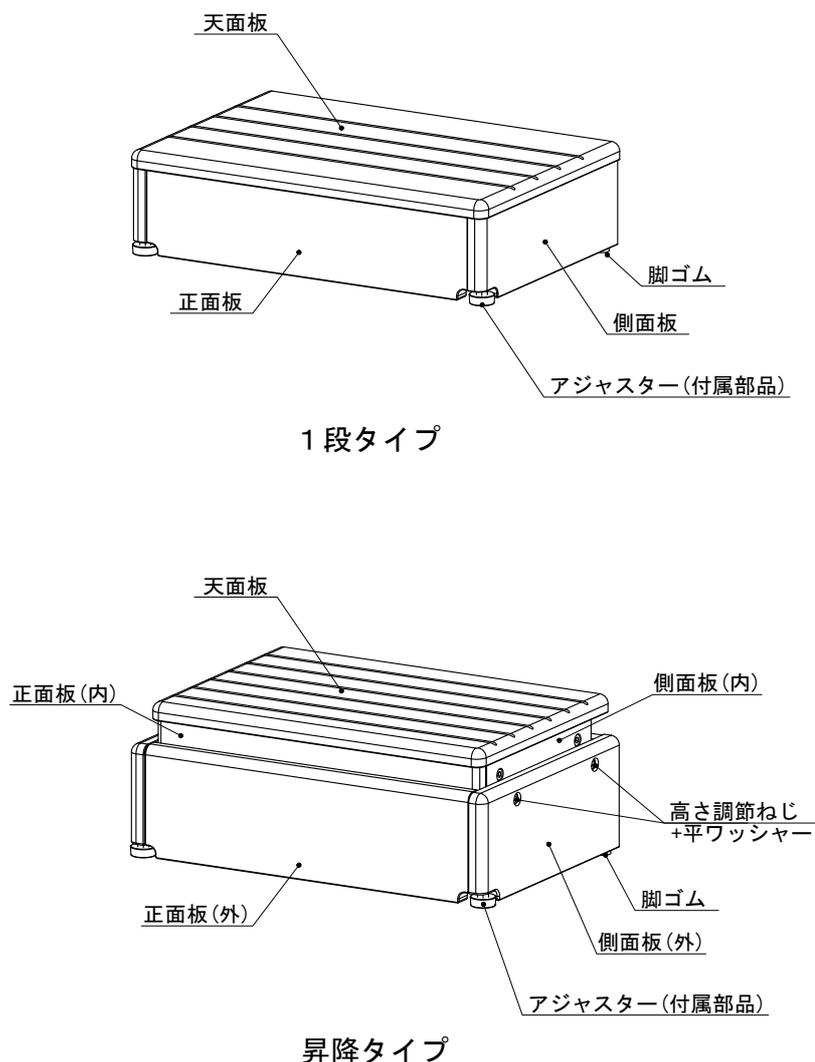

【付属部品】

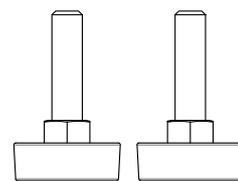

アジャスター

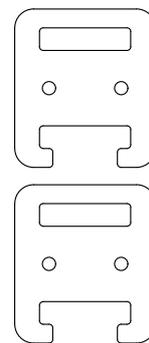


固定金具B



固定金具A用ねじ
(皿タッピンねじ 3-20)



固定金具B用ねじ
(なべタッピンねじ 3-12)

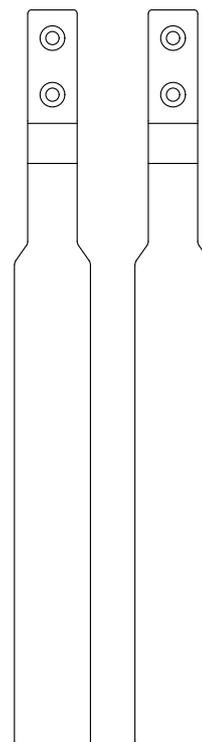

固定金具A


部 品 名	材 質	数量	備 考
本体	天然木	1	—
脚ゴム	エラストマー	2	本体に組み付け
アジャスター	エラストマー・スチール	2	付属部品
固定金具A	スチール(焼付塗装)	2	付属部品
固定金具B	スチール(焼付塗装)	2	付属部品
固定金具A用ねじ(皿タッピンねじ 3-20)	スチール	4	付属部品
固定金具B用ねじ(なべタッピンねじ 3-12)	スチール	4	付属部品
高さ調節ねじ(十字穴付なべ小ねじM6-30)(※)	ステンレス	4	本体に組み付け
高さ調節平ワッシャー(M6-13-t1.0)(※)	ステンレス	4	本体に組み付け

(※)は昇降タイプのみ付属

組立方法


《1段タイプ・昇降タイプ》

- ① アジャスターを下図のように本体へ取り付けてください。
(1段タイプはこの作業のみとなります)

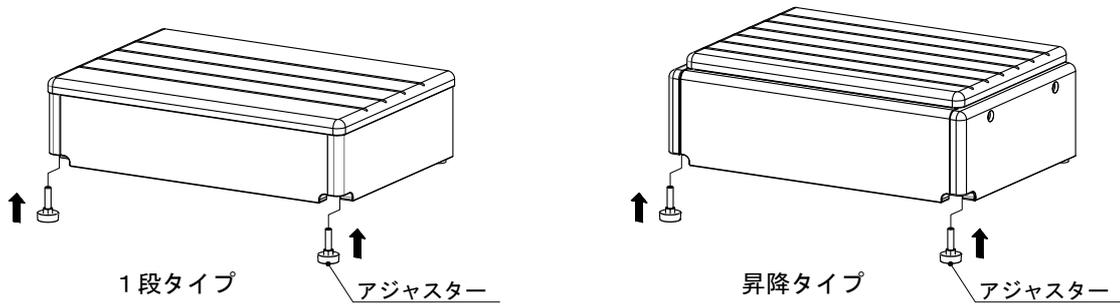


《以下、昇降タイプのみ》

- ② 本体に固定されている高さ調節ねじ (M6-30mm:4本) と平ワッシャー (M6:4枚) をドライバーで外してください。
※開封時の設定高さは15cmです。15cmで使用する場合は、以下の組立作業は省略してください。

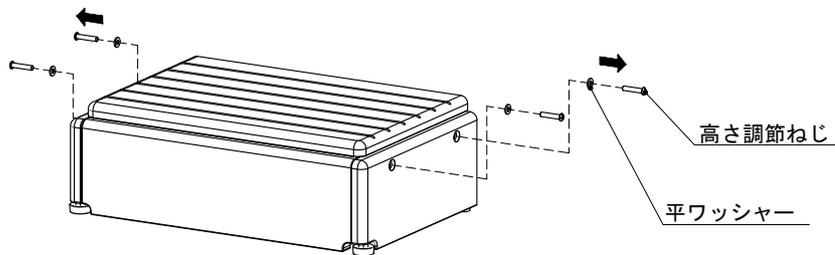


- ③ 天面板を上スライドさせ、設定したい高さのねじ穴を側面板(外)のねじ穴に合わせます。
※玄関の段差に合わせて高さを決めていただきますが、段差に対しておよそ半分の高さに設定することで昇り降りがスムーズに行えます。

《設置面から天面板までの高さの決め方》

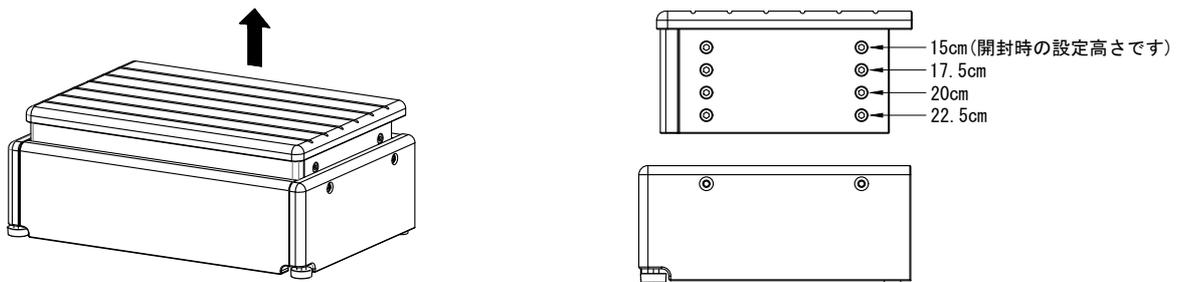

- ④ 高さ調節ねじ (M6-30mm:4本)、平ワッシャー (M6:4枚) をドライバーでしっかり固定してください。
※床面に布などを敷き、その上に玄関台を横に立てた状態にすると、作業しやすくなります。



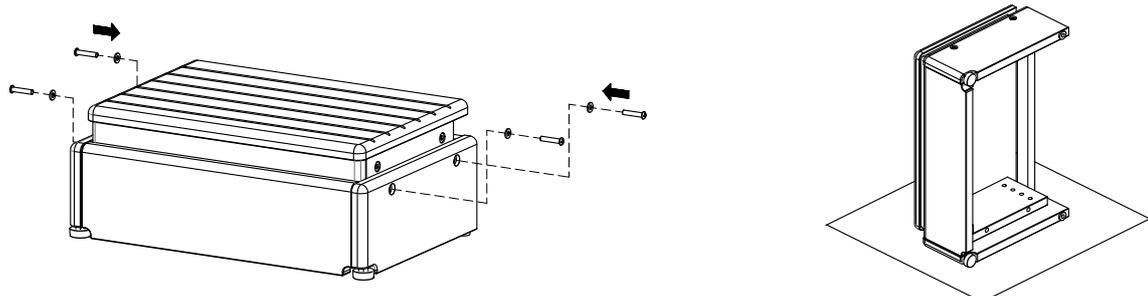


注意

高さ調節が終わった後は高さ調節ねじが完全に固定されているか確認してください。
きちんと固定ができていないと天面板が落下する恐れがあります。


取付方法 ※取付は納入業者の方に行っていただくようお願い致します。

- ① 背面板裏側にキリ等で下穴を開け、端から60mm程度の位置に固定金具Bを付属のねじ(なベタッピンねじ 3-12)で取り付けしてください。(推奨下穴径：φ2~2.5、深さ：10mm程度)
 ※固定金具Bの向きによって、玄関台を取り外すことができます。(6ページ取外方法)

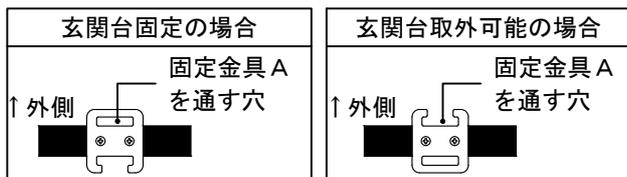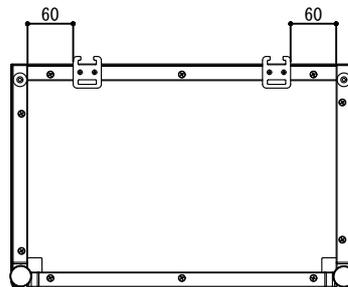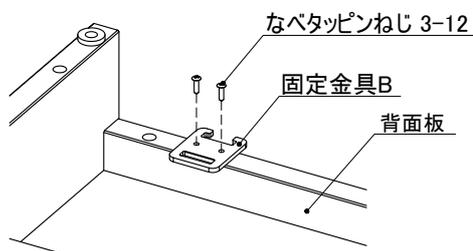


注意 下穴を開けて、ねじを固定してください。木製のため、割れる恐れがあります。



- ② 玄関台に取り付けた固定金具Bに、固定金具Aを差し込み、上がりかまちに固定するねじ穴の位置を決めてください。ねじ穴位置が決まったら、キリ等で下穴を開け、固定金具Aを付属のねじ(皿タッピンねじ 3-20：4本)で取り付けしてください。(推奨下穴径：φ2~2.5、深さ：16mm程度)
 ※上がりかまちの形状(段差有り・段差無し)により固定金具Aの取付方向が変わります。

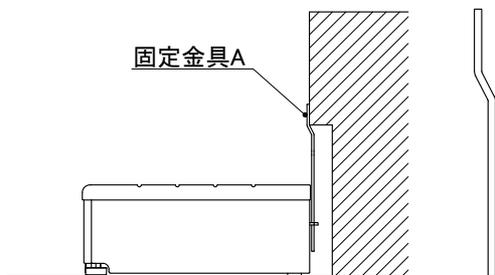

【段差有り】

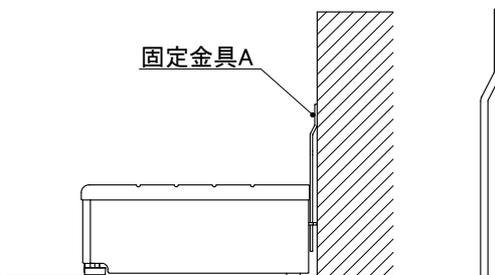

【段差無し】

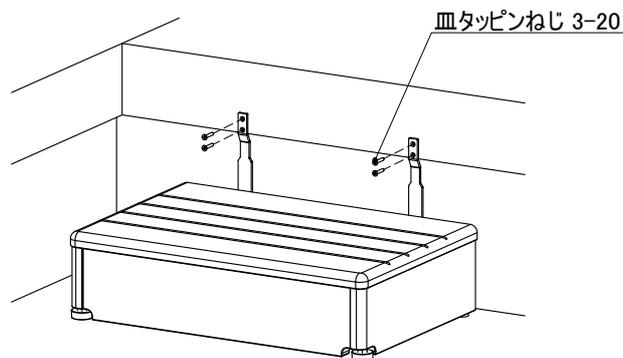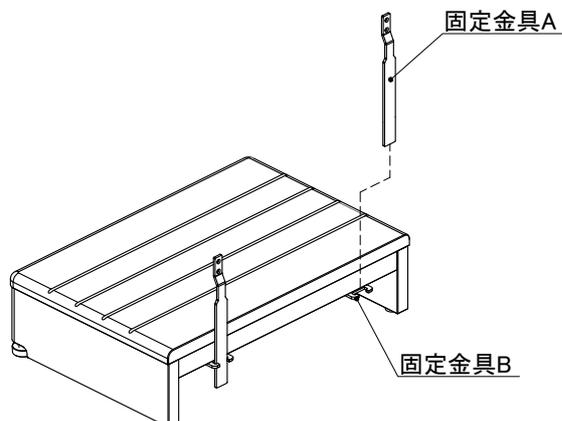


注意 玄関台は必ず付属の固定金具で上がりかまち部に固定してください。玄関台を固定せずに使用すると、使用中に玄関台が動き、転倒の恐れがあります。

取付方法

※取付は納入業者の方に行っていただくようお願い致します。

③ 玄関台にガタツキがある場合は、アジャスターで微調整してください。

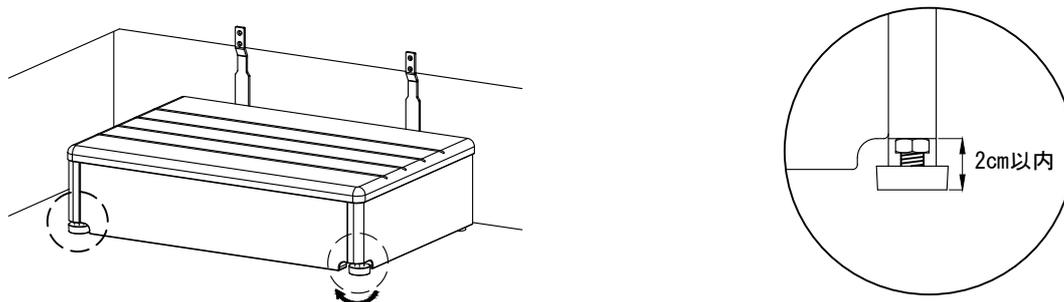


注意

高さ微調節用のアジャスターは2cmより長く突出させないでください。
使用中に抜ける恐れがあります。




警告

玄関台を設置するときは付属の固定金具で上がりかまち部に固定してください。
玄関台を固定せずに使用すると、使用中に玄関台が動いたり、ひっくり返ったりして、
転倒やけがの恐れがあり危険です。

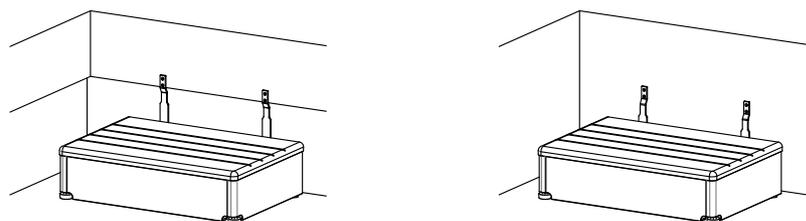

警告


段差や斜面には絶対に設置しないでください。転倒やけがの恐れがあり危険です。

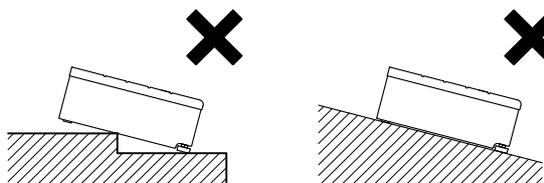


取外方法

※固定金具Bを「玄関台取外可能の場合」で取り付けた場合

- ① 玄関台に取り付けてある固定金具Bを固定金具Aの金具が細い箇所まで持ち上げてください。

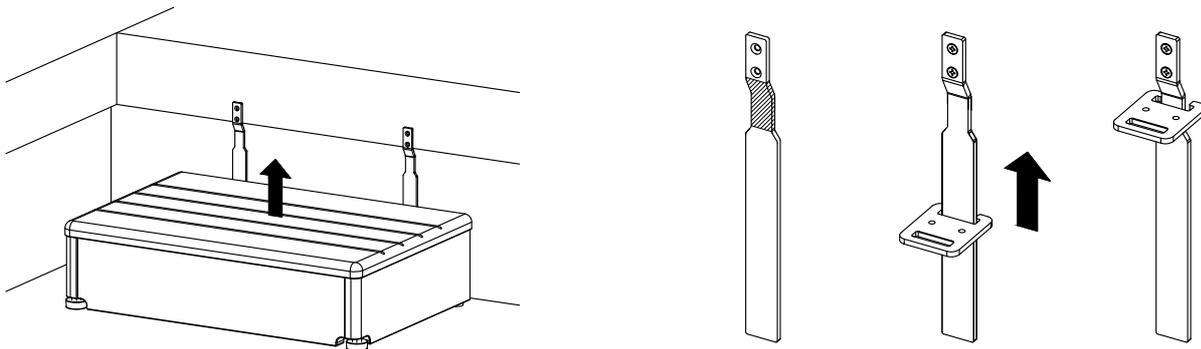

- ② 玄関台を手前にゆっくりと引いて、固定金具Aから取り外してください。

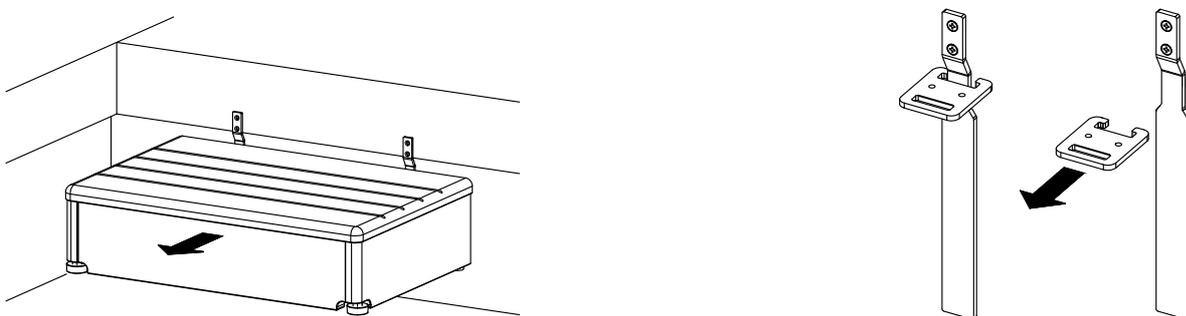

注意

玄関台を取り外す際は上に真っ直ぐ持ち上げてから手前に引いてください。取付金具Aの細い箇所まで持ち上げずに引くと固定金具が外れる恐れがあり、破損の原因になります。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。

汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。



注意

下記のもの、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

■点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、破損、その他異常がないか確認してください。



注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

■保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。



注意

高温多湿の場所で保管しますと、変形や変色の原因となります。

保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理いたします。

- 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。
(本来の用途以外で使用した場合、耐荷重を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
 - 弊社が示す説明書に基づいた組み立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
 - 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガレキ、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
 - お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
 - その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

〈個人情報の取扱いについて〉

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてご預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1年間	ご住所 〒
品名		
販売店		ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・取扱などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

039-5004



株式会社 **シコク**

本社工場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>