






微笑 被膜補助手すり

取扱説明書



このたびは、「被膜補助手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意




ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。	
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。	
 左の記号は必ず実行していただく「強制」内容です。	 左の記号はしてはいけない「禁止」内容です。	 左の記号は「分解しないでください」の内容です。

警告

 禁止	浴室・洗面所・トイレにて安全に立ったり座ったり、また玄関での靴の履き替え時にバランスを保持するための動作補助手すりです。荷物移動の支えや重量物をぶらさげるなど、他の用途には使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。
 必ず実行	手すりと壁面との間に手や腕が入り込まないように十分に注意して使用してください。 手や腕が挟まれることにより、重大事故につながる恐れがあります。
	濡れた手や、石けんのついた手で手すりを使用する時や、手すりが濡れていたり、石けんがついている時は、十分に注意して使用してください。 手が滑り、重大事故につながる恐れがあります。
	介護が必要な方がお使いになられる場合は、介護者が事故の発生がないように十分に注意して使用してください。 使用者が手すりをつかみ損なうなどにより、重大事故につながる恐れがあります。

注意

 分解禁止	分解や改造は絶対にしないでください。 手すりが破損や外れたりして、けがの原因になります。
 禁止	手すり以外の用途には使用しないでください。(ぶら下がったり、上に登ったり、ゆすったり、けったり、洗濯物や布団などを手すりに干したりなど) 手が滑ったり、手すりが外れたりして、けがの原因になります。
 必ず実行	定期的に、取付ビスなどの緩みやガタツキがないか、取付状態を点検してください。 手すりが破損したり外れたりして、けがの原因になります。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

⚠ 注意

下記のもの、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ


■点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

⚠ 注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

使用例

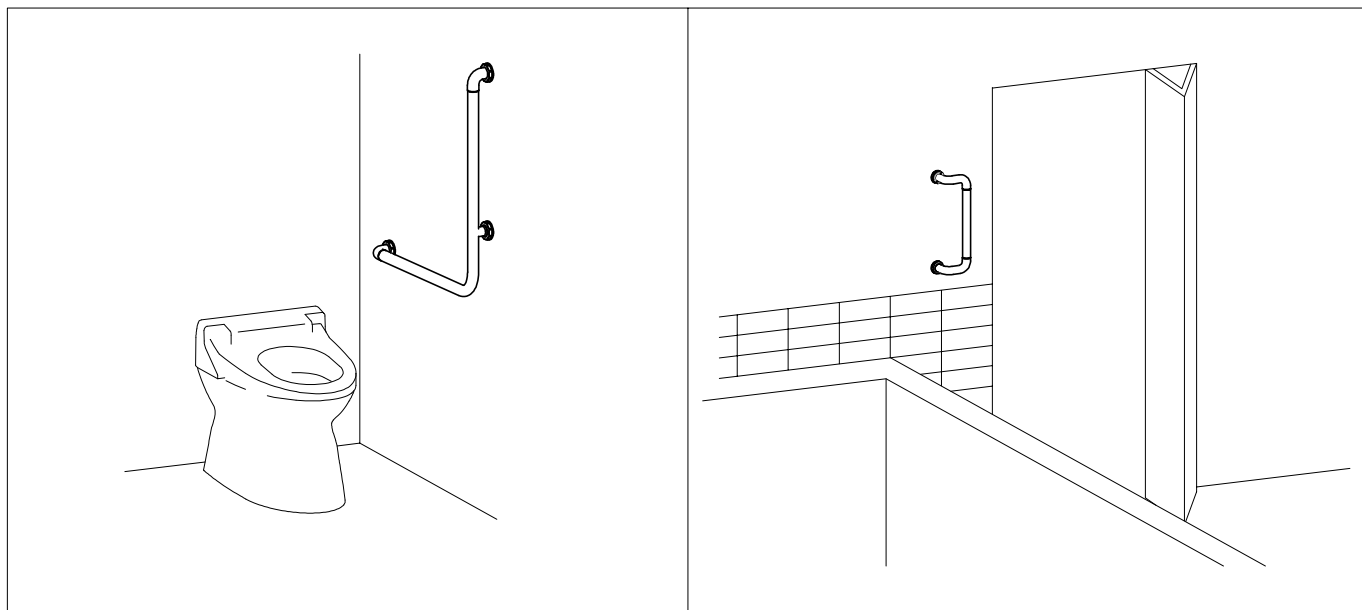

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

17.04



〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111代 FAX (0879) 42-1112

<http://www.sk-shikoku.co.jp>