



このたびは、「被膜補助手すり 31型 / 32型」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


取り付け前に、本書をよくお読み頂き、安全に正しく施工されるようお願いいたします。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

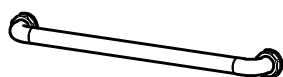

31型

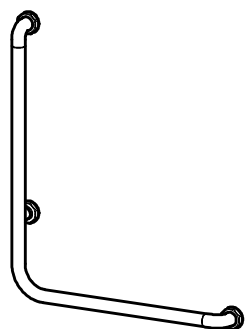

32型 3525・7060

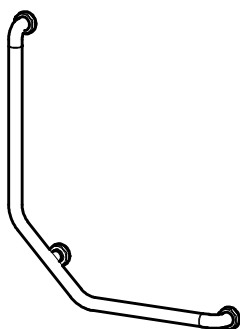

32型 A7060

も く じ

使用上のご注意 1

各部のなまえ・材質 . . . 2

仕様 3～4

取付手順 5～7

用 途	浴室・洗面所・トイレ等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
特 徴	31型（40・60・80）、32型3525（右・左）、32型7060（右・左）、32型A7060（右・左）の4タイプ（計：9種類）あります。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用の前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただけますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。


 左の記号は必ず実行していただく「強制」内容です。	 左の記号はしてはいけない「禁止」内容です。	 左の記号は「分解しないでください」の内容です。
--	---	---

 警告	
 禁止	浴室・洗面所・トイレにて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。荷物移動の支えや重量物をぶらさげるなど他の用途には使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。



 注意	
 分解禁止	取付工事店以外の人には絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 手すりが外れたりして、けがの原因になります。
 必ず実行	取り付けは必ず取付工事店が行ってください。 取り付けが不安定となり、けがの原因になります。
	必ず強度を確保できる壁・建築構造体に取り付けてください。 強度がない場合は補強材を設けてください。 手すりが外れたり、取付面が壊れたりして、けがの原因になります。
	各種下地への取付手順をよく読み、十分な下地の厚さ及び補強があることを確認してください。 取り付けが不安定となり、手すりが外れたり取付面が壊れたりして、けがの原因になります。
	浴室などの水まわりへ取り付けの場合、取付穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布してください。 壁裏へ水が浸入し手すりが外れたり、取付面が壊れたりして、けがの原因になります。
	商品に強い応力が加わった状態で無理に取り付けしないでください。 手すりが折れたり、外れたりして、けがの原因になります。
 禁止	取り付け完了後、手すりにガタツキがないことを確認してください。 手すりにガタツキがあると、手すりが外れたり取付面が壊れたりして、けがの原因になります。
	商品を落とさないでください。 製品の破損や変形、傷つきが発生し、組み立てできない恐れがあります。

各部のなまえ・材質


31型

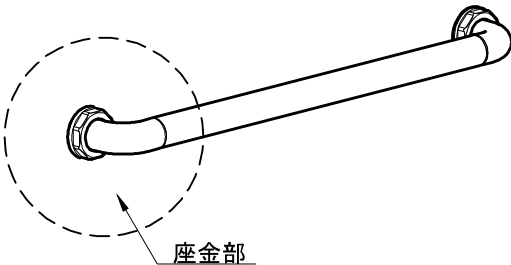

32型

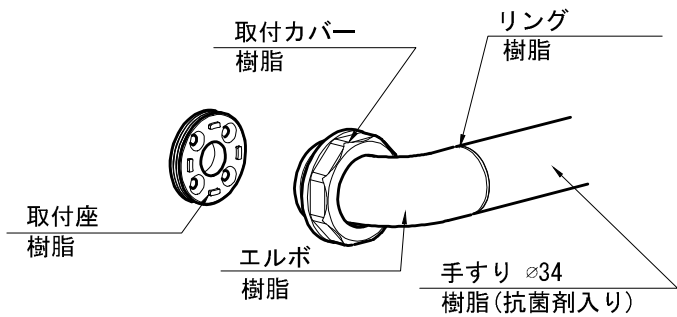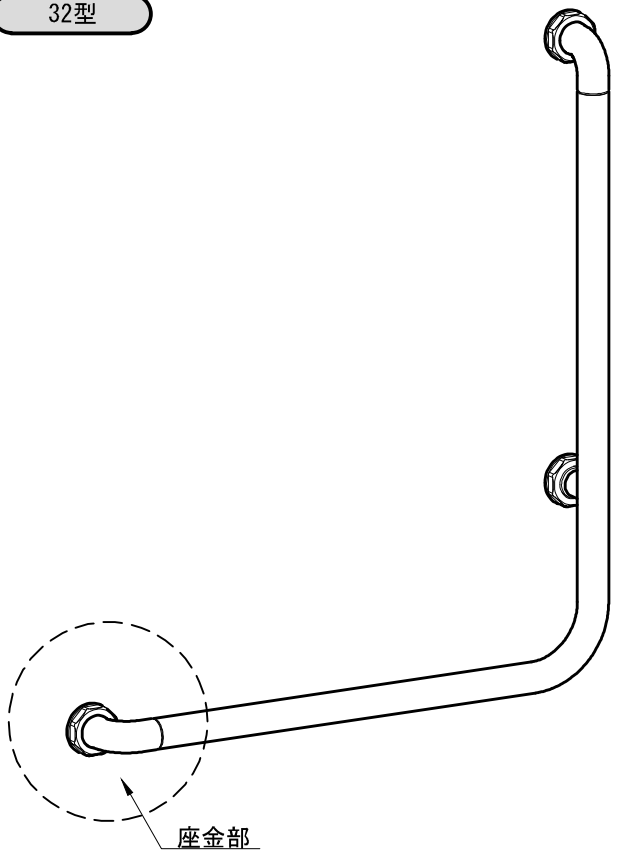

取付座 ビス穴詳細

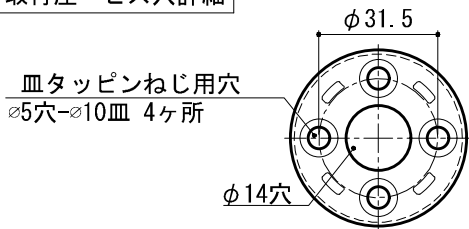


付 属 品

姿図			
品名	十字穴付き皿 タッピンビス Φ4.5×45	樹脂プラグ Φ6×30	保護シート
材質	ステンレス	樹脂	樹脂

仕様

【単位：mm】


31型

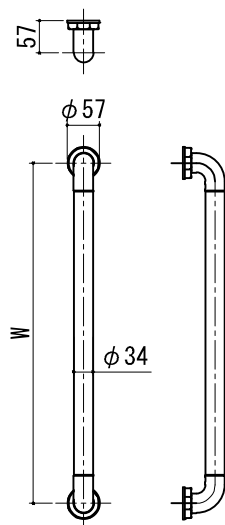

品 名			W芯寸	品番コード	
被膜補助手すり	31型	40	400	710-311	色コード
被膜補助手すり	31型	60	600	710-312	色コード
被膜補助手すり	31型	80	800	710-313	色コード

付 属 品	
十字穴付き皿タッピンねじΦ4.5×45	8本
樹脂プラグ Φ6×30	8本
保護シート	2枚

32型 3525

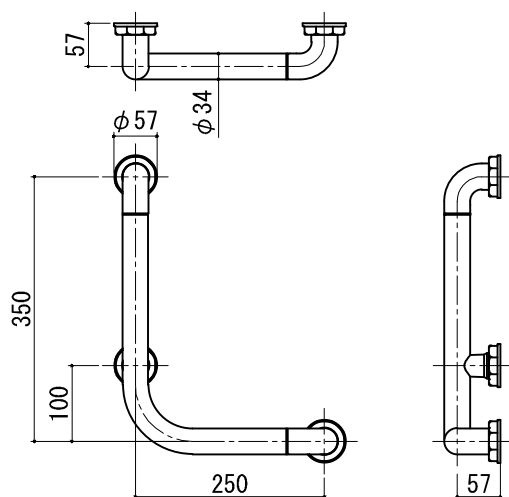


品 名			品番コード
被膜補助手すり	32型	3525右	710-321 色コード
被膜補助手すり	32型	3525左	710-322 色コード

付 属 品	
十字穴付き皿タッピンねじΦ4.5×45	12本
樹脂プラグ Φ6×30	12本
保護シート	3枚

※本図は、左（L）を示します。

32型 7060

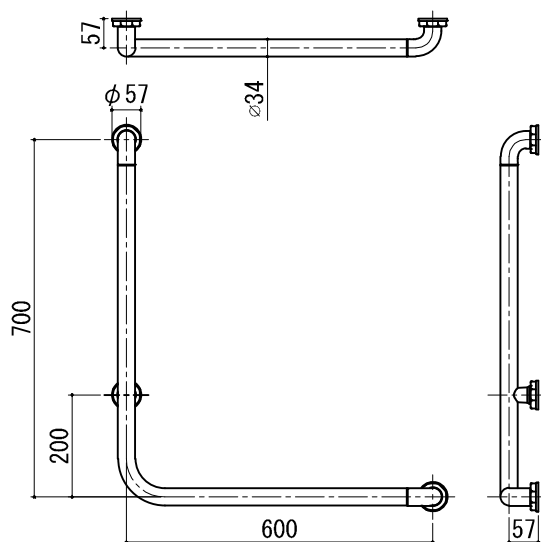


品 名			品番コード
被膜補助手すり	32型	7060右	710-323 色コード
被膜補助手すり	32型	7060左	710-324 色コード

付 属 品	
十字穴付き皿タッピンねじΦ4.5×45	12本
樹脂プラグ Φ6×30	12本
保護シート	3枚

※本図は、左（L）を示します。

【単位：mm】

32型 A7060

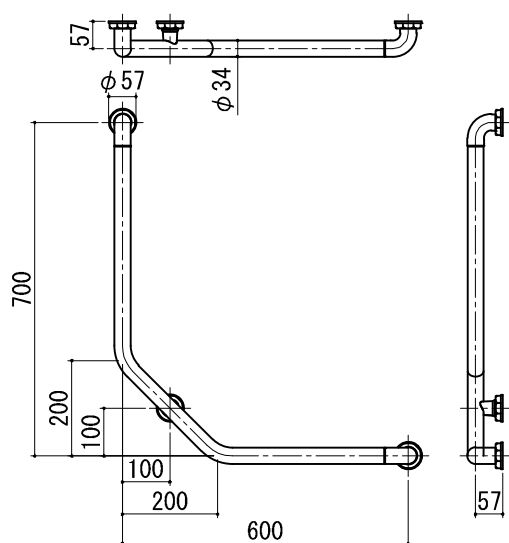

※本図は、左（L）を示します。

品 名			品番コード	
被膜補助手すり	32型	A7060右	710-325	色コード
被膜補助手すり	32型	A7060左	710-326	色コード

付 属 品	
十字穴付き皿タッピンねじΦ4.5×45	12本
樹脂プラグ Φ6×30	12本
保護シート	3枚

色コード	色
AW	アイボリーホワイト
B U	ベージュ
L I	木目調ライト

取付手順


◆取り付け前の注意：取り付け前に以下の内容をよくお読みになってください。

⚠ 注意

- 手すりを取り付ける壁に十分な強度があることを確認してください。
付属の「皿タッピンねじ」4本で取り付ける場合、厚みが12mm以上の合板、又は同等以上の下地材に取り付けてください。
下地材が薄い場合は12mm以上の補強板を設けてください。
- 浴室などの水まわりへ取り付ける場合、取付穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布してください。
- 屋外や水没する場所には取り付けないでください。
変色したり、変形するおそれがあります。
- 壁裏に、水道管や配線がないことを確認してください。
- 固定方法は、建物の構造に応じて適切な方法を選んでください。


1 取付箇所を決める

1-1. 点線で囲った基準箇所から取り付けてください。

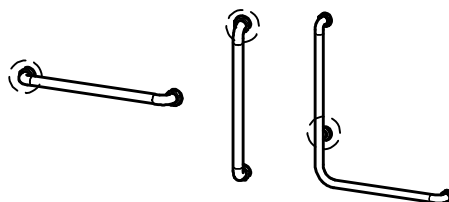

1-2. 基準箇所の取付位置をけがき、「保護シート」の水平基準線とけがき線を合わせ、両面テープの剥離紙を剥がして貼り付けてください。

(両面テープの剥離紙は水平基準線で折り曲げると剥がしやすくなります。)

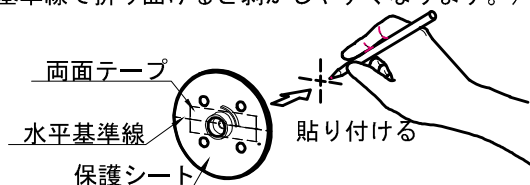


1-3. ①「保護シート」の両面テープの剥離紙を剥がし、他の箇所の「取付座」にはめ込んでください。

②基準箇所の「取付座」を壁に貼り付けた「保護シート」にはめ込み、水平器等で手すり固定箇所の位置決めをして取付面に手すり本体ごと押し当ててください。

(基準箇所以外の固定箇所に保護シートを取付面に貼り付ける作業です。)

③手すり本体を取付面から外すと、「保護シート」だけがそれぞれの取付位置に残る状態になります。
押し当てた「保護シート」が取付面にきちんと接着されているか確認してください。

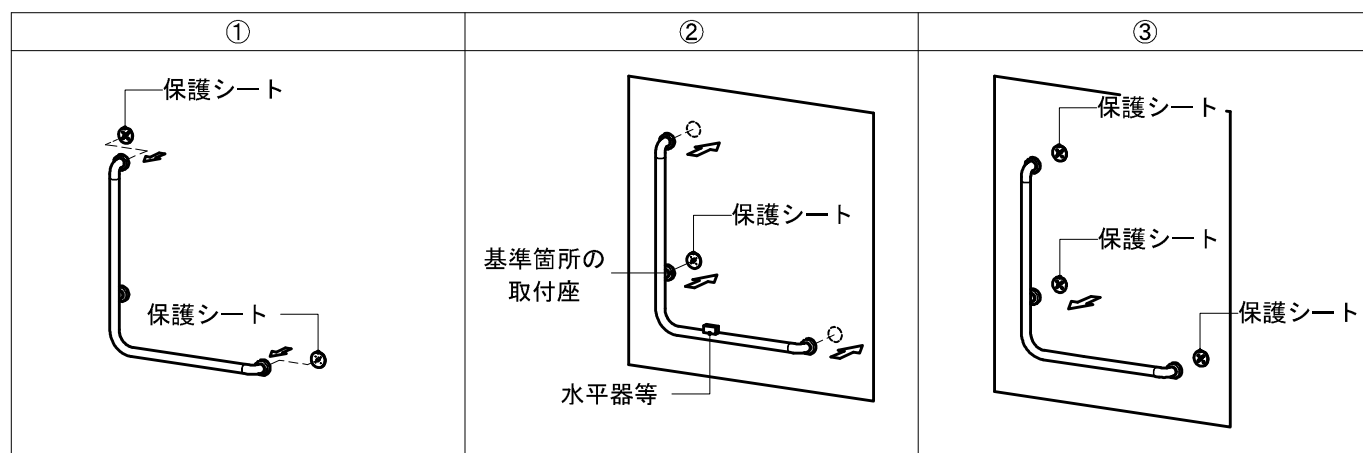


取付手順

2 手すり本体の取り付け

- 2-1. 取付面に接着した「保護シート」をゲージとして、「保護シート」の上から付属の皿タッピンねじの下穴を開けてください。



使用する付属ビス	下穴径	下穴深さ	施工する下地
皿タッピンねじ	3mm	-	木下地（補強合板 厚み12mm以上）
皿タッピンねじ +樹脂プラグ	6mm	45mm	コンクリート（厚み100mm以上）

保護カバーの4カ所の穴へ
下穴をそれぞれ開ける。

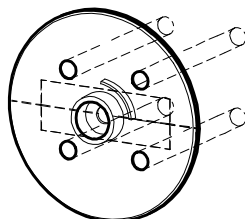


- 2-2. 「保護シート」に「取付座」をはめ込み、付属の「皿タッピンねじ」で固定してください。

※付属の「樹脂プラグ」は2-1.に記載している施工する下地に合わせてご使用ください。

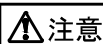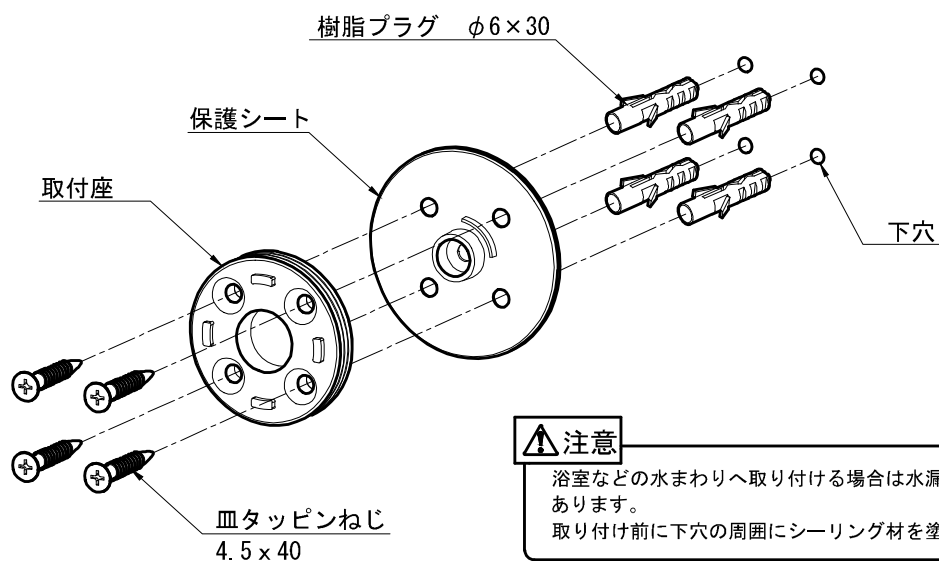

注意
浴室などの水まわりへ取り付ける場合は水漏れの危険性があります。
取り付け前に下穴の周囲にシーリング材を塗布してください。


- 2-3. 手すり本体の凹部に「取付座」の凸部をはめ込み、「取付座」に「取付カバー」を合わせ、「取付カバー」を回して締めてください。

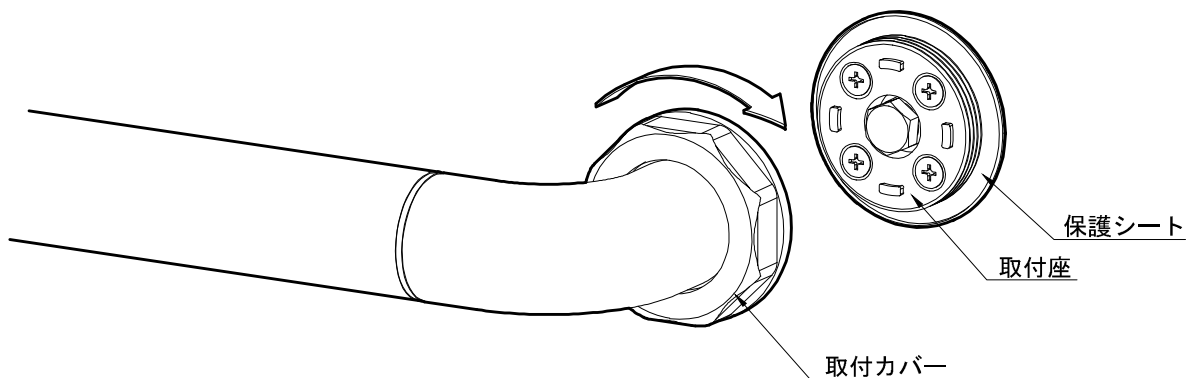

取付手順

3 手すり取り付け後の点検

3-1. ガタツキがないか、「取付座」に「取付カバー」がしっかりと締め付けられたか確認してください。

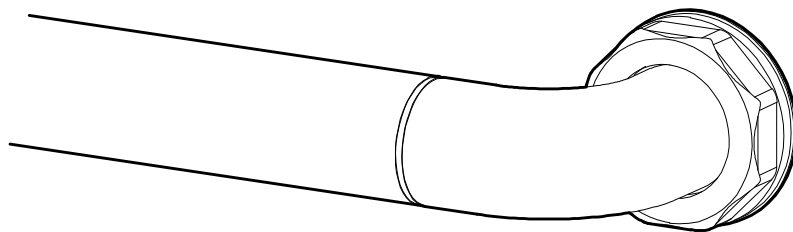

同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

106-5002A



〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>