

このたびは、「ベストサポート手すり 微笑の撫子 ジョイントブラケット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取り付け前にこの取付説明書をよくお読み頂き、安全に正しく施工されるようお願いいたします。

取り付け後は、お客様にご使用方法を十分ご説明ください。

安全上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。


 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

	左の記号はしてはいけない「禁止」内容です。		左の記号は必ず実行して頂く「強制」内容です。
---	-----------------------	---	------------------------

 警告			
	一般住宅に取り付ける歩行補助手すり以外では使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。		転倒防止用ガードレールや防護柵、ベランダの柵、窓格子など断崖地、転落の恐れのある場所などで使用しないでください。 重大事故につながる恐れがあります。
	取り付けは必ず指定寸法に従ってください。 手すりが破損し、けがの原因になります。		

 注意			
	製品に強い応力が加わった状態で無理な取り付けをしないでください。 手すりが折れたり、外れたりしてけがの原因になります。		取り付けは必ず取付工事店が行ってください。 取り付けが不安定となり、けがの原因になります。
	製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認してください。 手すりが外れたりして、けがの原因になります。		取付工事店以外の人が分解したり、修理・改造は行わないでください。 手すりが外れたりして、けがの原因になります。

各部のなまえ・材質

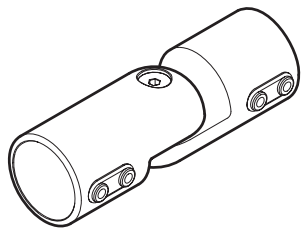


○付属品

- ・六角レンチ 対辺4mm 1本
- ・六角レンチ 対辺3mm 1本
- ・皿頭ドリルねじ小頭 4×19 4本

商品寸法図


単位：mm

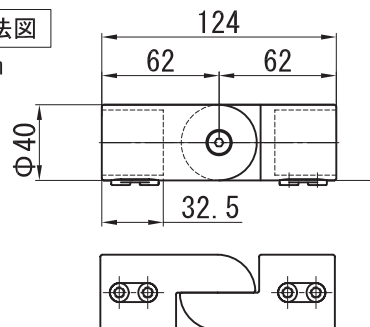

品 名	品番コード
ベストサポート手すり 微笑の撫子 ジョイントブラケット	636-0P10

部 材 の 名 称	材質
ジョイントブラケット 本体	アルミダイキャスト
ねじ類	ステンレス


取付手順

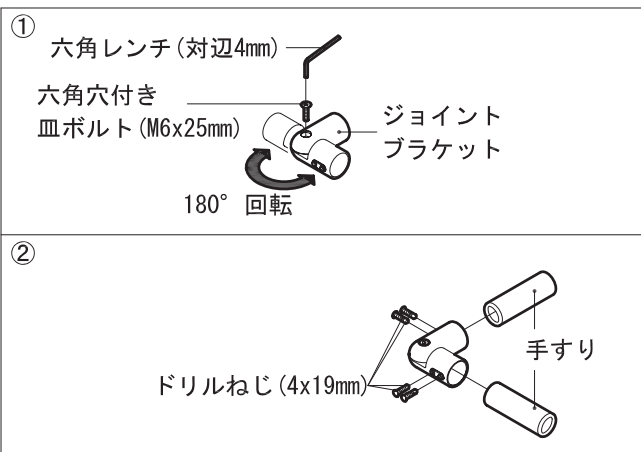

① 六角穴付き皿ボルト (M6x25mm) をジョイントブラケットを取り付ける角度を決め、六角穴付き皿ボルト (M6x25mm) で固定してください。

② ジョイントブラケットと手すり（別売）を固定します。
手すりをジョイントブラケットに差し込み、ドリルねじ（4×19mm）を電動ドライバー（別売）などでしっかり締め付けてください。
※ジョイントブラケットへの手すり入込寸法は32.5mmになります。
ドリルネジが締まりにくい場合は、Φ3のドリルで下穴をあけてください。

取付指定寸法

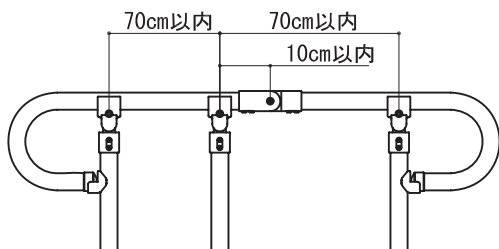

- ・手すりは必ず3本以上の支柱で設置してください。
- ・ジョイントブラケットは支柱間でのみ使用してください。
- ・2本の支柱間で2個以上のジョイントブラケットを取り付けしないでください。

⚠ 注意

製品の取り付け後に、ぐらつきやガタツキが無く確実に固定されているか確認してください。
手すりが外れたりして、けがの原因になります。

取付は必ず指定寸法に従ってください。
手すりが破損し、けがの原因になります。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

20.08
053-5004



本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<http://www.sk-shikoku.co.jp>