


ベストサポート手すり用固定具

品番：620-050

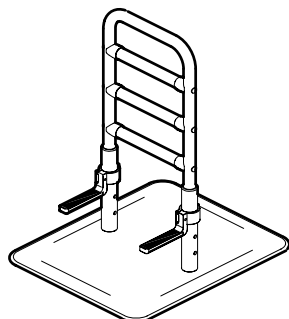

このたびは「ベストサポート手すり用固定具」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項につきまして記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管ください。

もくじ

安全上のご注意	1
設置上のご注意/使用上のご注意	2
製品の特長・仕様/部品表・組立の準備、組立の方法	3
お手入れ方法/連絡先	4

- 「ベストサポート手すり用固定具」は「ベストサポート手すり」をベッドで使用する際の安定度の向上を図る製品です。
- 床からベッドサイドフレーム底面までの高さ28～292mm範囲でご使用になれます。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、組立、設置を正しく行い、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

『お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。』

 必ず実行していただく 「強制」内容です。	 してはいけない 「禁止」内容です。
---	--

警告	
	・「ベストサポート手すり」の支柱に取り付けて使用する以外は使用しない。 ・固定具のアームホルダーの上に人が乗らない。 ・改造、加工等を行わない。 ・弊社の製品と他者製品との組み合わせによる制作物をつくらない。 ・設置後、ガタツキ、ボルトのゆるみ、締め忘れがないことを必ず、確認する。
注意	
	・ご使用の際は介護者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認する。 （ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合は、医師や介護士などの専門員に相談してください。） ・固定具は左右セットで使用してください。 ・定期的にガタツキ、ねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。 ・「ベストサポート手すり」の取扱説明書のご注意事項もあわせてお読みいただき、十分に注意してください。

設置上のご注意

⚠ 注意



- ・「ベストサポート手すり」の安定性向上以外の目的で使用しないでください。
- ・固定具のアームホルダーの上面とベッドサイドフレームの底面を確実に当ててください。
- ・「ベストサポート手すり」はベッドと平行に、隙間は最小になるように設置してください。
- ・固定具は「ベストサポート手すりの支柱」範囲内で固定してください。
- ・設置後、ガタツキ、六角穴付きボルトのゆるみ、締め忘れがないことを確認してください。
- ・室内でご使用してください。

※「ベストサポート手すりの支柱」に固定具を取り付けた箇所は、支柱に傷がつく場合があります。

使用上のご注意

⚠ 注意



- ・ベッドを移動、ベッドを交換される場合は、固定具を外してから移動、再度設置してください。
(固定具を外される時は六角レンチで六角穴付ボルトを外してください。)
- ・再度組立て作業される時は、「ベストサポート手すり用固定具」の取扱説明書をお読みいただき組立て手順、設置上のご注意に従って設置してください。



- ・足をかけたり、踏み台として使用しない。
- ・固定具のヒンジ部が突起していますので、衣服などを引っ掛けないように注意してください。
- ・定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないことを確認してください。



製品の特長・仕様・部品表

- 「ベストサポート手すり用固定具」は、「ベストサポート手すり」をベッド側面に設置後、分解することなく、後付で固定具を「ベストサポート手すり」に取り付けできます。

品 番	外形寸法 (mm)	材 質	色 調	質 量	外 観
620-050	54 x 209 x 65	アルミ合金 (アクリル樹脂 焼付け塗装)	カーキ色 黒色 (ゴムシート)	295 g × 2個	
	六角穴付ボルト M6x20	ステンレス	生地	6g × 2個	
	六角レンチ 80 x 20 対辺5mm	スチール	黒色	18 g	


組立の準備

- 組み立て前に、定規（測定するもの）を用意してください。
- 床面からベッドサイドフレーム底面までの高さを測定してください。
- 床面からベッドサイドフレーム底面までの高さによって、取付方法が異なります。

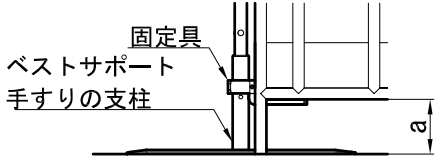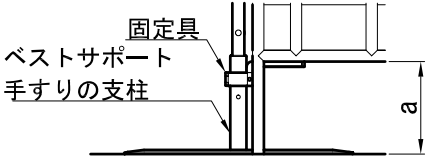
取付方法1	高さ(a) 28mm～210mmの場合	取付方法2	高さ(a) 211mm～292mmの場合
 ※固定具をL型方向にして取り付ける。		 ※固定具を逆L型方向にして取り付ける。	

組立方法


- 「ベストサポート手すりの支柱」に固定具を取り付ける時は、納入業者（介護福祉製品を扱う業者）の方をお願いします。
- 固定具を支柱に取り付ける作業は、下記の手順で行ってください。

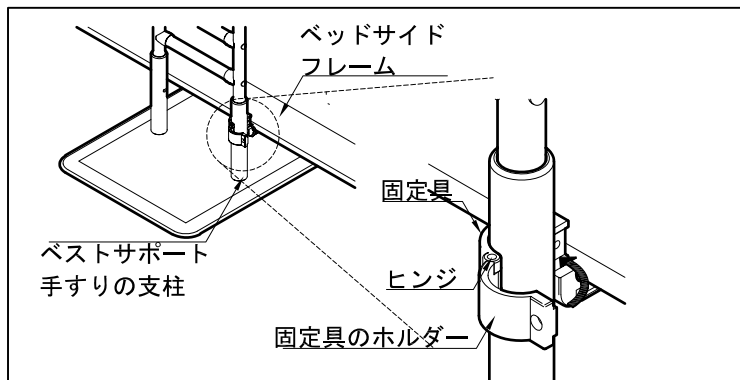

- ① 「ベストサポート手すり」をベッドの側面の最適な位置を決めてください。
- ② ベッドの高さに応じて固定具の取付方向を決めてください。
- ③ 固定具はヒンジを介して、固定具のホルダーを開放して、「ベストサポート手すりの支柱」にはさんでください。

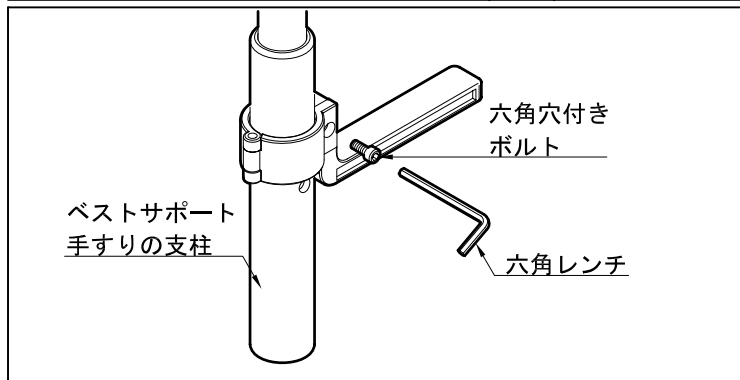

- ④ 六角穴付きボルトを六角レンチで固定具をゆるみがないようにしっかり最後まで締め付けてください。

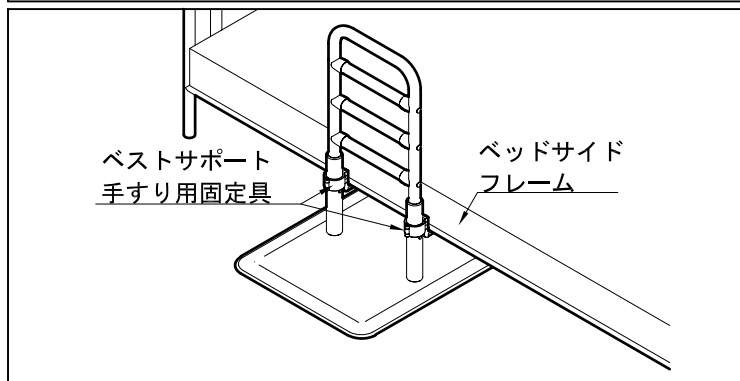

- ⑤ 固定具は左右支柱の2箇所固定してください。
- ⑥ 固定具のアームホルダーが確実にベッドサイドフレーム底面に当接して、ガタツキやねじれがないことを確認する。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

汚れがひどい場合は、水か薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきとってください。

洗剤が残らないように水拭きして、最後に柔らかい布で水けを完全にふきとってください。

 注意



シンナー・ベンジン等を使用しないでください。（変質して破損する恐れがあります。）
たわしや磨き粉で磨かないでください。（傷つく恐れがあります。）

■点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないことを確認してください。

 注意



異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

■消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。

アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。

 注意



オゾンガス、ホルムアルデヒドガス等の消毒は使用しないでください。

■保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。

 注意



高温多湿の場所に保管しますと、錆び発生等の原因になります。

17.05



<http://www.sk-shikoku.co.jp>

本社工場 〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112