




HOHOEMI

連結伸縮手すり

取扱説明書 保証書

このたびは、「連結伸縮手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の組み立て方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

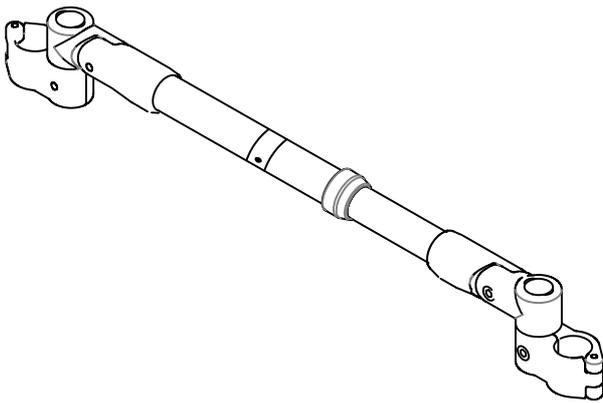

も く じ

使用上のご注意	1
設置・保管上のご注意	2
仕様	3
各部の名称・材質	3
組立手順	4～7
お手入れ方法	8
メモ	9～10
保証書	11

用 途

置き型手すりを連結することで移動補助の手すりを構築し、動線を確保する連結手すりです。
手すり以外の用途には使用しないでください。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



警告

- ・歩行を補助する以外の用途で使用しないでください。
- ・水平方向に力を加えないでください。
- ・手すりに力をかけた際にベースプレートが持ち上がり接地面と隙間が発生するような使用はしないでください。
- ・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。
- ・公道などの道路にはみ出して使用しないでください。
- ・製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。
- ・車いすからの立ち座りには使用しないでください。
- ・改造や加工をしないでください。
- ・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。
ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。
ご使用の際は介助者が付き添って使用することをお勧めします。身体の状態に合わない場合は直ちにご使用を中止してください。
- ・予測できない行動をとる、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。
ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。
自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。



注意

- ・介助者が必要な方が使用する場合は十分注意してください。
- ・手すり部や使用者の手が濡れた状態で使用する場合は滑りやすいため注意してください。
- ・ご使用の際は指や腕の挟み込みに注意してください。


設置・保管上のご注意

- ・連結できる製品の組み合わせは弊社HPの製品情報をご参照ください。
<https://www.sk-shikoku.co.jp/products/rail/entry-577.html>
- ・指定以外の弊社製品や他社製品を組み合わせず使用しないでください。
 他の製品と組み合わせた製作物の安全は保障できません。



製品情報


- ・伸縮範囲を超えるため、リミットシール(赤色)が見えた状態で取り付けしないでください。

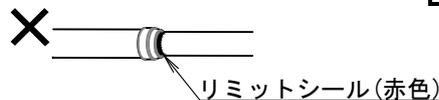

- ・手すりの長さを調節した後、手すり固定用ねじを2ヶ所固定してから使用してください。


- ・平らで水平な場所に設置してください。
- ・固定式でないため設置後の安定性をよくご確認ください。
- ・設置後、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。
- ・定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

- ・手すりの上下振りの角度が45度を超える設置はしないでください。

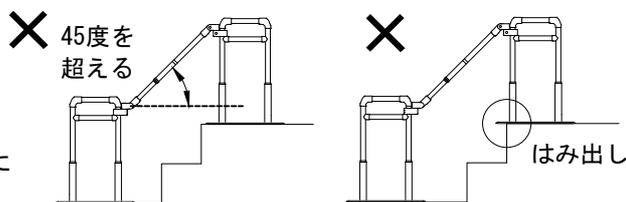


- ・段差に設置する場合は連結した手すりのベースプレートが段差からはみ出さないようにしてください。

- ・手すりの左右振りの角度が90度未満となる設置はしないでください。

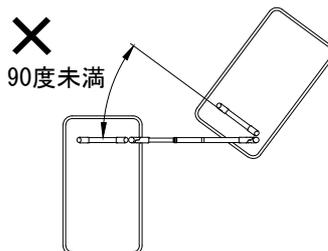

- ・必ず動線上にベースプレートを踏む面があるように連結して使用してください。

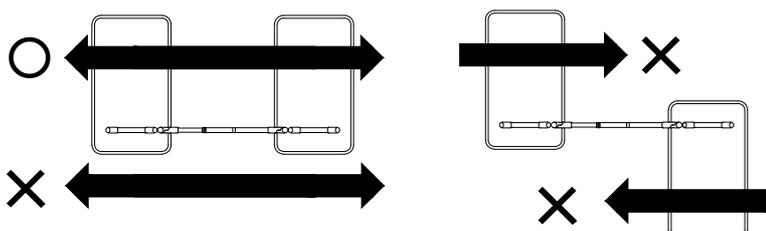


警告



注意

- ・移動させる場合は必ず連結伸縮手すりの手すり部を取り外してください。
- ・結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- ・破損、変形などの原因となりますので、以下のような場所への設置は避けてください。
 - ・冷暖房器による冷気や暖気が直接当たる場所
 - ・過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
 - ・高温、多湿、低温、乾燥した場所
 - ・ほこり、煙、塩分、硫黄分、腐食性物質などの多い場所
 - ・換気の悪い場所
 - ・振動や衝撃のある場所
- ・直射日光が当たる場所に設置すると、金属部が熱くなる可能性があるためやけど等に注意してください。
- ・ご使用になれる環境により、サビが発生する場合がありますので注意してください。


仕様

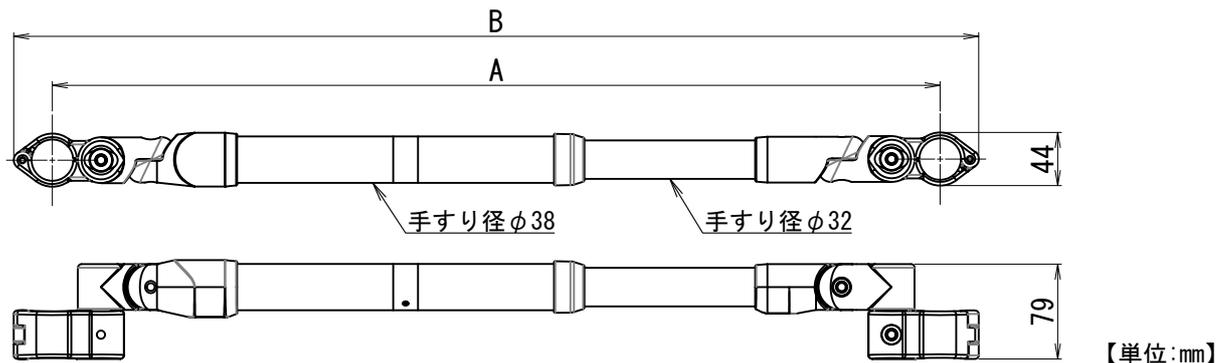

品名	品番コード	TAISコード	重量	A寸法	B寸法	最大伸縮幅
連結伸縮手すり 730	620-080RS	01235-000332	約1.4kg	590mm~730mm	655mm~795mm	140mm
連結伸縮手すり 940	620-090RS		約1.6kg	730mm~940mm	795mm~1005mm	210mm
連結伸縮手すり 1250	620-100RS		約1.9kg	940mm~1250mm	1005mm~1315mm	310mm

※最大使用者体重 100kg

各部の名称・材質

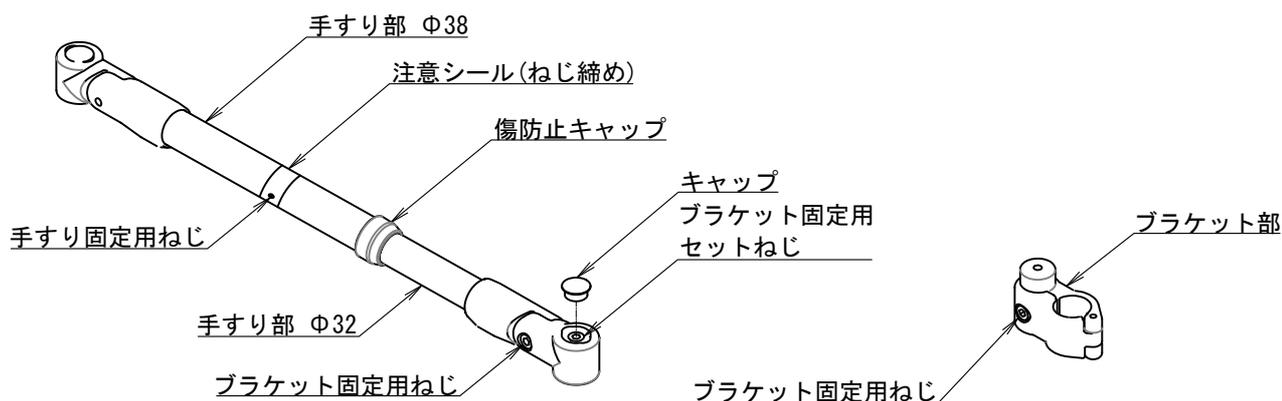

部 材 の 名 称	材 質	入 数
手すり部 Φ32, Φ38	グリップ: PVC被膜 アルミパイプ ジョイント: アルミ	1台
ブラケット部	ブラケット: アルミ 内側ゴム: EPDM	2台
キャップ	ABS	2個
傷防止キャップ	ASA	1個
注意シール(ねじ締め)	PVC	1枚
ブラケット固定用セットねじ (六角穴付きボルトP=3 M8x20mm)	ステンレス	2本
ブラケット固定用ねじ (六角穴付きボルト M8x20mm)	ステンレス	4本
手すり固定用ねじ (六角穴付き止めねじ(平先) M5x4mm)	ステンレス	2本
付 属 品		
六角レンチ (対辺6mm)	スチール	1本
六角レンチ (対辺2.5mm)	スチール	1本

組立手順


組立上のご注意



- ・ P. 2設置上の注意をご確認頂いたうえで組立をしてください。
- ・ 組み立ては納入業者の方に行っていただくようお願いします。
- ・ ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。
- ・ 六角レンチは六角穴に対してまっすぐ差し込んでください。

1. ブラケット部取り付け

連結する製品をブラケット部で挟み、ブラケット固定用ねじを六角レンチ(対辺6mm)で締めて固定してください。

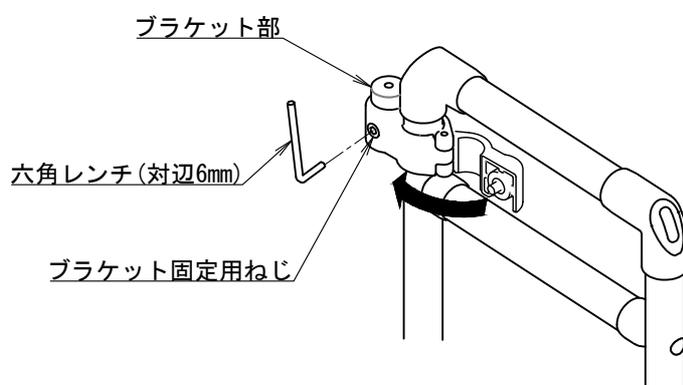


手すり部とブラケット部が組み合わされた状態でも取り付けすることはできますが、長さ調節しやすくするため、上図のように、ブラケット部のみを先に取り付けすることをおすすめします。


組立手順

2. 手すり部の差し込み

2-1 手すり部が伸縮できる状態まで、手すり固定用ねじを六角レンチ(対辺2.5mm)で2ヶ所、緩めてください。
※ただし、緩めすぎには注意すること。

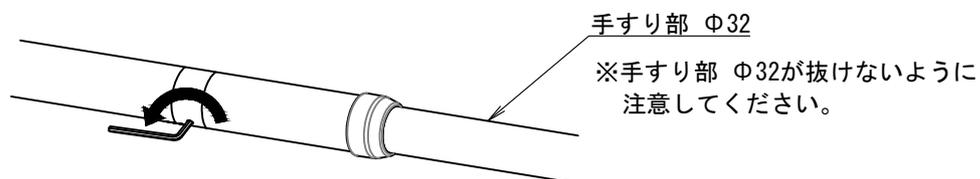


2-2 手すり部のキャップを外し、ブラケット固定用ねじを六角レンチ(対辺6mm)で仮止めにした状態で、手すり部をブラケット部にまっすぐ差し込んでください。

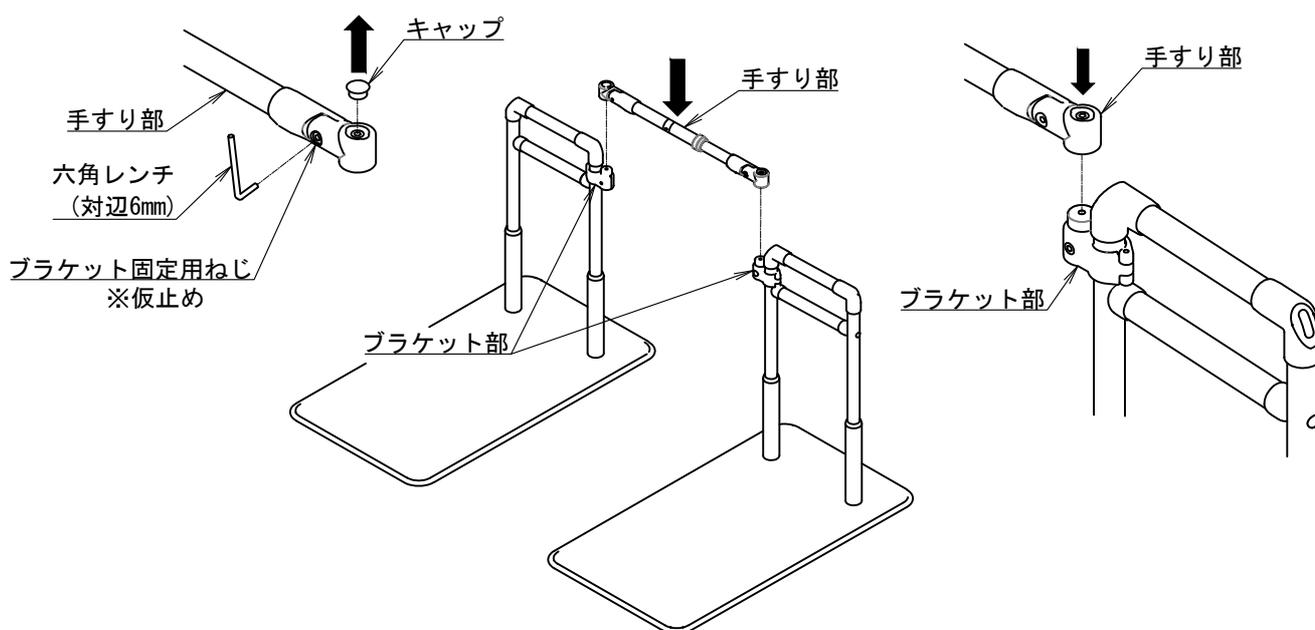

組立手順


3. 手すり部の固定

3-1 手すりの長さを調節してから、手すり固定用ねじを六角レンチ(対辺2.5mm)で2ヶ所、締めて固定してください。

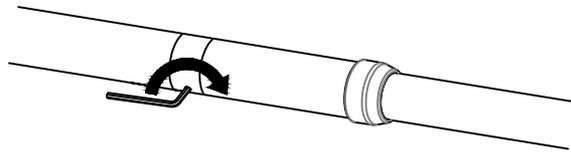

⚠ 注意


- ・手すり固定用ねじを必要以上に強く締め付けしないでください。ねじが破損し、固定できなくなります。目安は手すり表面と面一になる程度です。
- ・手すり固定用ねじのねじ頭が手すり部の表面より出ていないことを確認してください。ねじ頭にぶつかりケガをするおそれがあります。

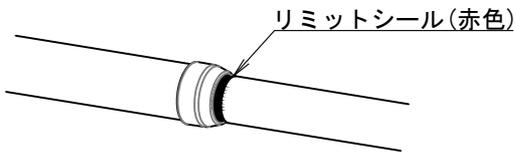

⚠ 注意

伸縮範囲を超えるため、リミットシール(赤色)が見えた状態で取り付けしないでください。

3-2 ブラケット固定用ねじ、ブラケット固定用セットねじを六角レンチ(対辺6mm)で締めて固定してください。最後に、キャップをはめてください。

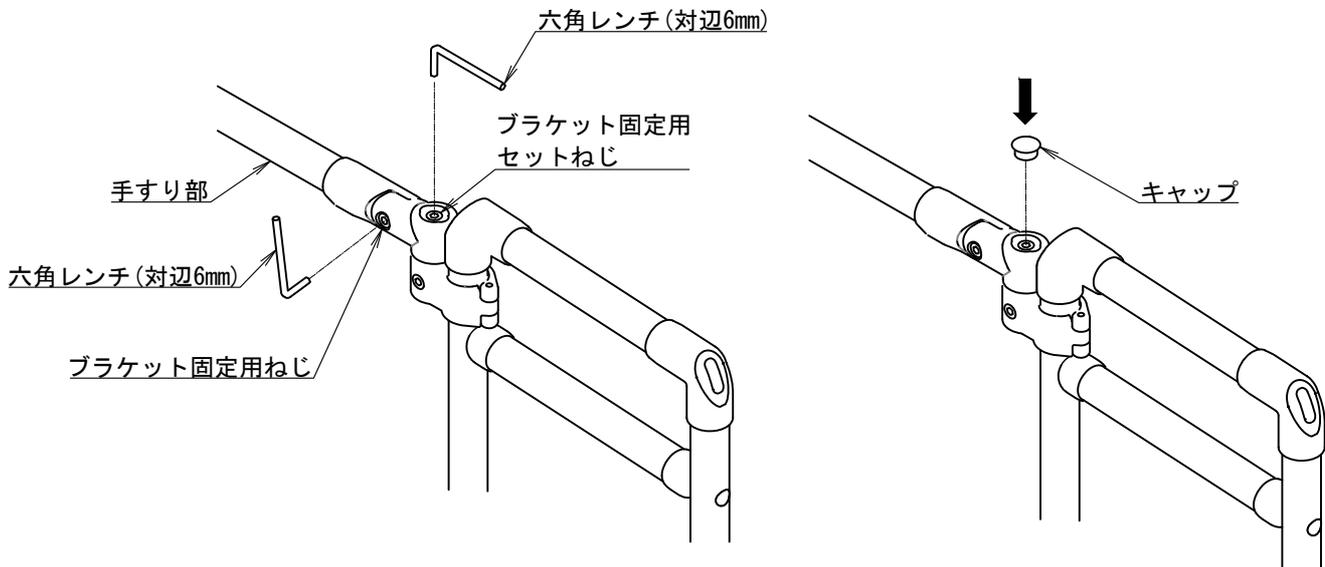


組立手順


4. 安全の確認

製品がガタつきなく設置されていることを確認してご使用ください。

【製品連結例】

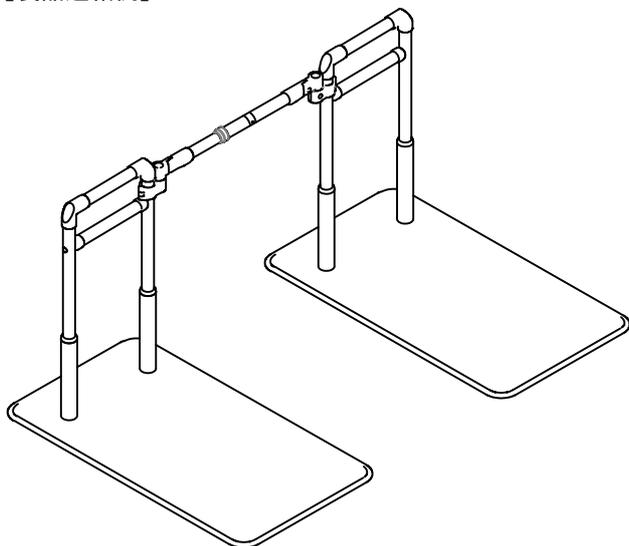

BSモア2-BSモア2 連結

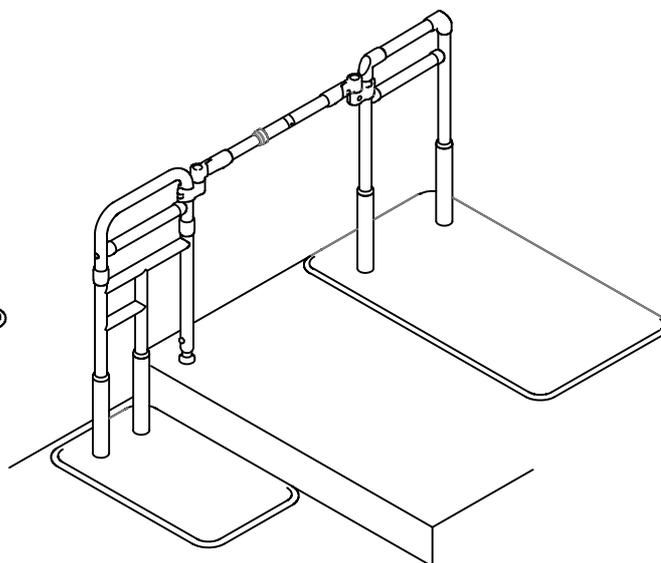

BS小路-BSモア2 連結

設置パターンは弊社HPの製品情報をご参照ください。
<https://www.sk-shikoku.co.jp/products/rail/entry-577.html>



製品情報

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

⚠ 注意

下記のもの、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

■消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。

⚠ 注意

下記のもの、消毒に使用しないでください。
オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）

■点検

定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

⚠ 注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

■保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。

⚠ 注意

高温多湿の場所で保管しますと変形の原因となります。

保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理いたします。

- 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障又は損傷。
(本来の用途以外で使用した場合、耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
 - 弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
 - 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
 - お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
 - その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

〈個人情報の取扱いについて〉

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1年間	ご住所
品名		
販売店		ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・取扱などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

101-5001



本社工場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>