



肘掛け手すり

取扱説明書

このたびは、「肘掛け手すり」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


この製品は「U-ケアTS」専用のオプション品となっております。

使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。


また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見れるところに必ず保管してください。

「U-ケア・U-ケアTS」の取扱説明書と合わせてご覧ください。

品 名	品番コード	重量
肘掛け手すり	627-003	約1.9kg

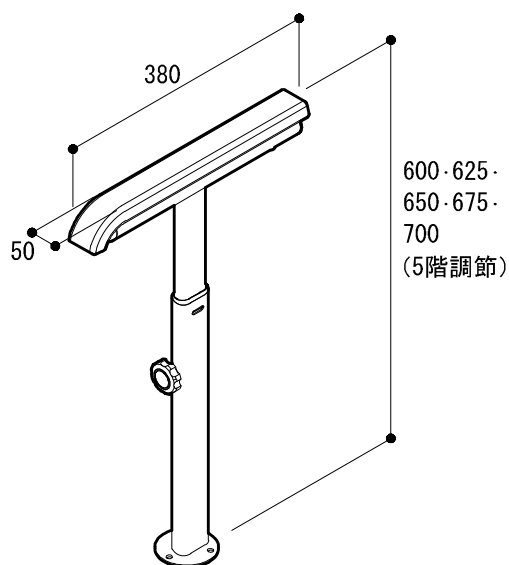

部材の名称	材 質	入 数
肘掛け	肘掛け部：PVC その他：ステンレス	1
楕円支柱	ステンレス キャップ部：PP	1
付 属 品		
高さ調節つまみ	本体：ABS キャップ：PC ネジ部：ステンレス	1
支柱固定用ねじ (六角穴付きボタンボルト M6x10mm)	ステンレス	3
六角レンチ 対辺4mm	スチール	1

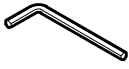付 属 品		
		
高さ調節つまみ	支柱固定用 ねじ	六角レンチ 対辺4mm

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

 警告	・本製品は「U-ケアTS」専用のオプション品です。ほかの製品に取り付けたり、別の用途で使用しないでください。 ・「U-ケアTS」に取り付けた際、ガタつきがないか必ず確認してください。 ・濡れた状態で使用しないでください。 ・弊社製品と他社製品を組み合わせ使用しないでください。 ・改造や加工をしないでください。
 注意	・組み立て、高さ調整は納入業者の方に依頼してください。 ・定期的に点検を行い、ガタつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。 ・直射日光が当たり金属が熱くなる可能性があるので注意してください。

組立手順


組立上のご注意

 注意	・組み立て、高さ調節は納入業者の方に行っていただくようお願いします。 ・ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。 ・六角レンチは六角穴に対してまっすぐ差し込んでください。 ・六角レンチを回す時は、力が強すぎるとねじ頭が破損するおそれがあります。
---	--

1. ベースプレート U字と楕円支柱の取り付け

支柱取付位置を確認し、ベースプレート表側より支柱固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で確実に締め付けてください。(楕円支柱1本につき3ヶ所)





※取付位置は、P.3の【支柱取付位置】をご参照ください。

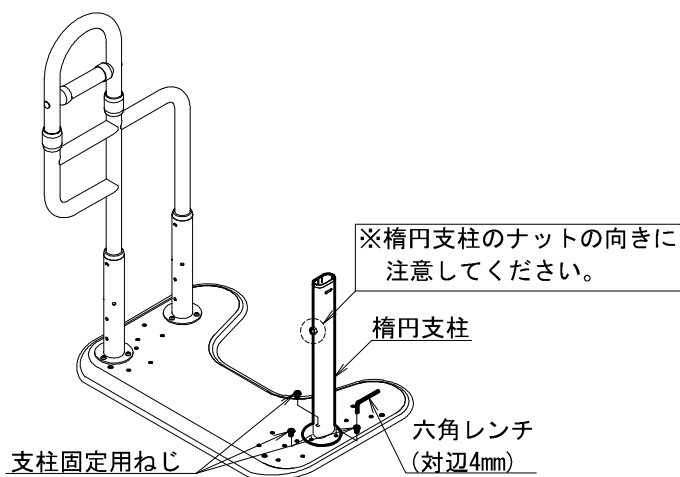

組立手順


【支柱取付位置】

※各パターン左右対称に取付け可能です。

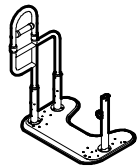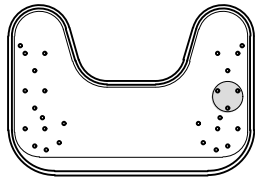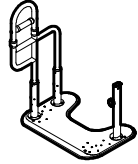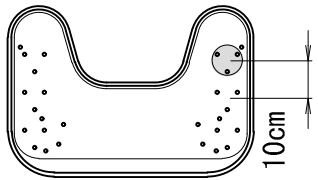パターン1		・標準の位置	
パターン2		・後ろに移動（10cm）	

⚠ 注意



右図の位置には支柱を絶対に取り付けないようにしてください。
使用時に製品が不安定になり、転倒の原因となります。

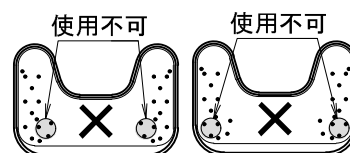

2. 手すりの高さ調節、取り付け

肘掛けの高さは、60cm, 62.5cm, 65cm, 67.5cm, 70cm (2.5cm間隔) で5段階の調節が可能です。

肘掛けの高さを決め、楕円支柱の上端部を肘掛けの目盛り(高さ表示シール)に合わせます。
高さ調節つまみを取り付けて、肘掛けと楕円支柱を固定してください。

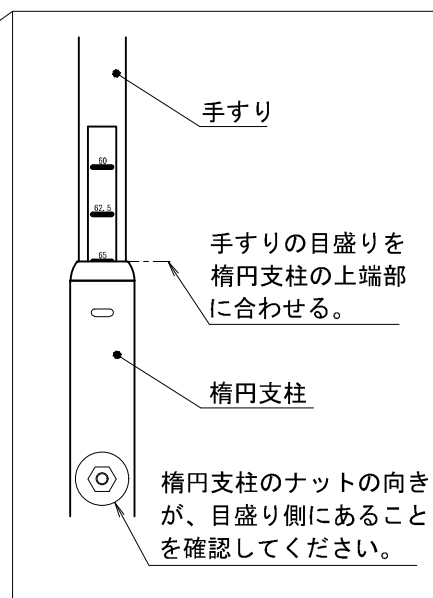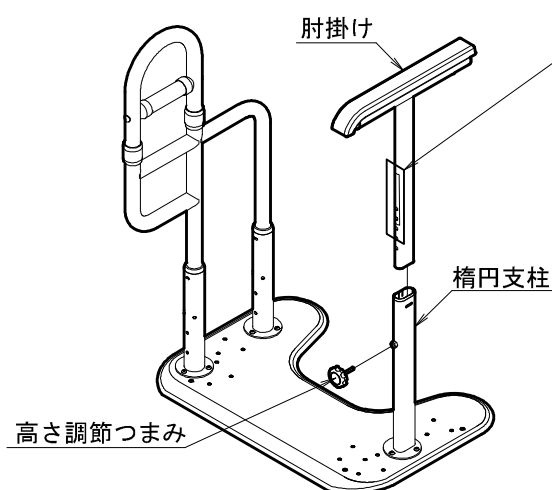

⚠ 注意

組立後、肘掛けや楕円支柱にガタつき、各部ねじの緩みがないことを必ず確認してください。

肘掛け手すり以外の組立手順に関しては
別紙「U-ケア・U-ケアTS」の取扱説明書をご覧ください。

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

⚠ 注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

■消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹼清拭消毒などを推奨します。

⚠ 注意

下記のものは、消毒に使用しないでください。
オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)

■点検

定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

⚠ 注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

■保管方法

直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。

⚠ 注意

高温多湿の場所で保管しますと、変形や変色の原因となります。

069-5002



本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>