

微笑

木製補助手すり 微笑の百合

取付ベース板 取付説明書

この度は、「木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板・取付ベース板用エンド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書には、この製品の取り付け方と使い方、ならびに使用上の注意事項について記載しています。

使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

取扱上のご注意


 警告	・本製品は、木製補助手すり 微笑の百合専用の取付ベース板です。それ以外の用途で使用しないでください。 ・取付は必ず指定寸法をお守りください。 ・必ず十分強度のある壁・建築構造体に取り付け、ねじが12mm以上ねじ込まれるよう取付をしてください。 ・屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には取付しないでください。 ・必ず同梱のねじ、または当社指定の部品を使用してください。 ・改造や加工をしないでください。 ・直接熱をかけたり、熱器具の近くに取付しないでください。 ・平らでない壁、十分に強度がない柱には取付しないでください。
 注意	・結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。 ・定期的に点検を行い、ガタつきやねじの緩み、部品の破損がないことを確認してください。 ・取付は必ず専門業者の方が行ってください。 ・取付は必ず適切な下穴を開けてからねじ固定してください。

使用上のご注意

 警告	・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。 ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士などの専門員に相談してください。ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。 ・予測できない行動をとる、自力で危険な状態から回避することができない方は使用しないでください。 ご使用される方の心身の状態や利用環境により、本体の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては重大な事故につながる恐れがあります。 自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。 ※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。
 注意	・ベース板は柱または間柱にしっかり固定してください。 ・設置後、ガタつき、ねじの緩み、締め忘れがないことを必ず確認してください。


寸法図及び部品表

取付ベース板 80×L2000 (L4000)

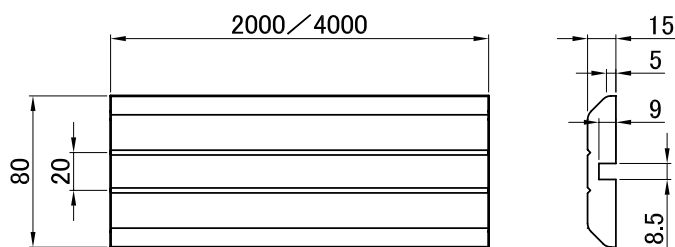


付 属 部 品	数量 L2000	数量 L4000
皿タッピンねじ 4.2×65	12	24
連結キャップ	12	24
連結ワッシャー	12	24

取付ベース板用エンド80

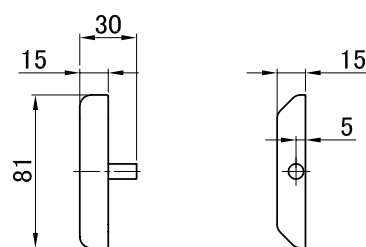


※取付には、接着剤が必要です。
別途ご用意をお願い致します。

取付ベース板 140×L2000 (L4000)

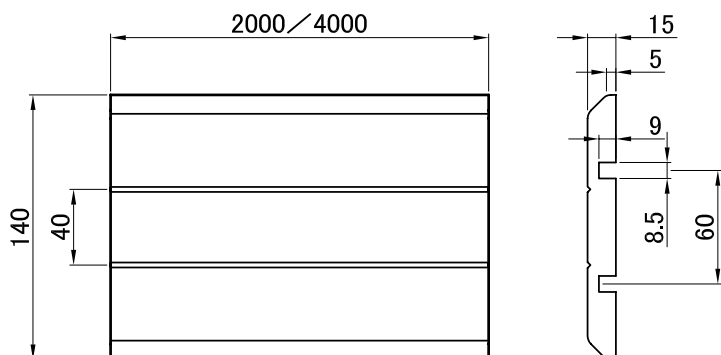


付 属 部 品	数量 L2000	数量 L4000
皿タッピンねじ 4.2×65	18	36
連結キャップ	18	36
連結ワッシャー	18	36

取付ベース板用エンド140

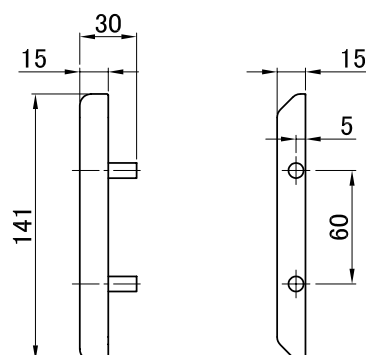

※取付には、接着剤が必要です。
別途ご用意をお願い致します。

取付上の注意

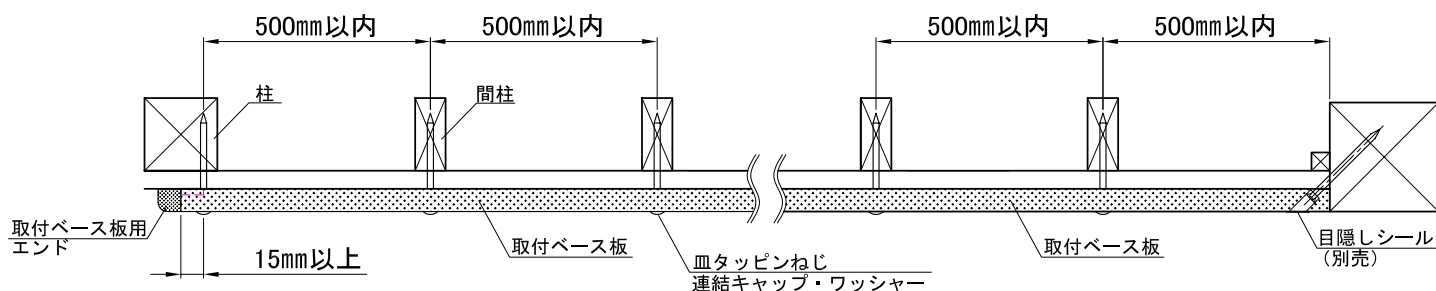

注意


柱に取り付けるねじの間隔は500mm以内とし、端部のねじ位置は端から15mm以上離れた位置にしてください。
取付ベース板は、柱または間柱にしっかり固定してください。取付ベース板の端部は必ず柱に固定してください。

取付上の注意


取合寸法 取付ベース板の「ミゾ」を「ねじ取付線」として利用すると作業が効率的です。

《80タイプの場合》


- ・エンドブラケットのみ使用の場合

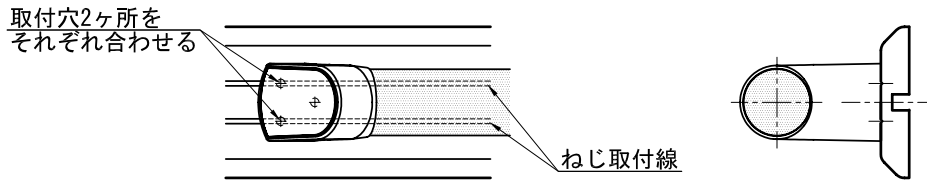

- ・I型ブラケットのみ使用の場合

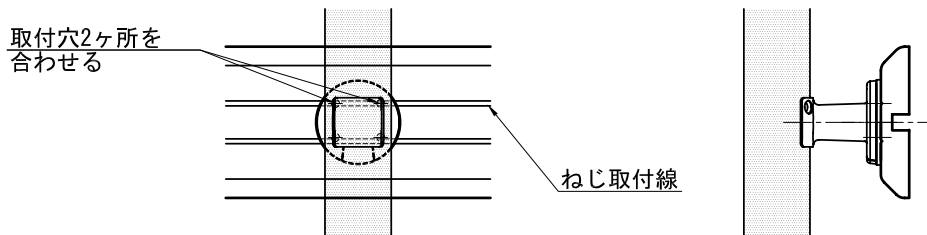


- ・L型ブラケット及び平面用自在ブラケットの使用の場合

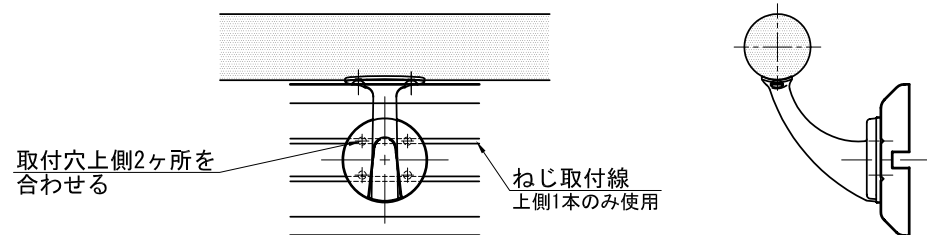


《140タイプの場合》

- ・エンドブラケットとL型ブラケット及び平面用自在ブラケットの組み合わせの場合

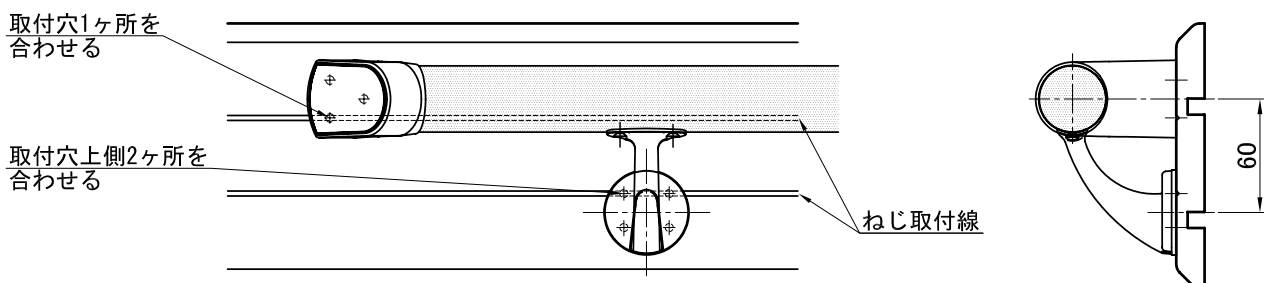

取付方法



①手すりの高さを決め、取付ベース板の取付位置を決める。

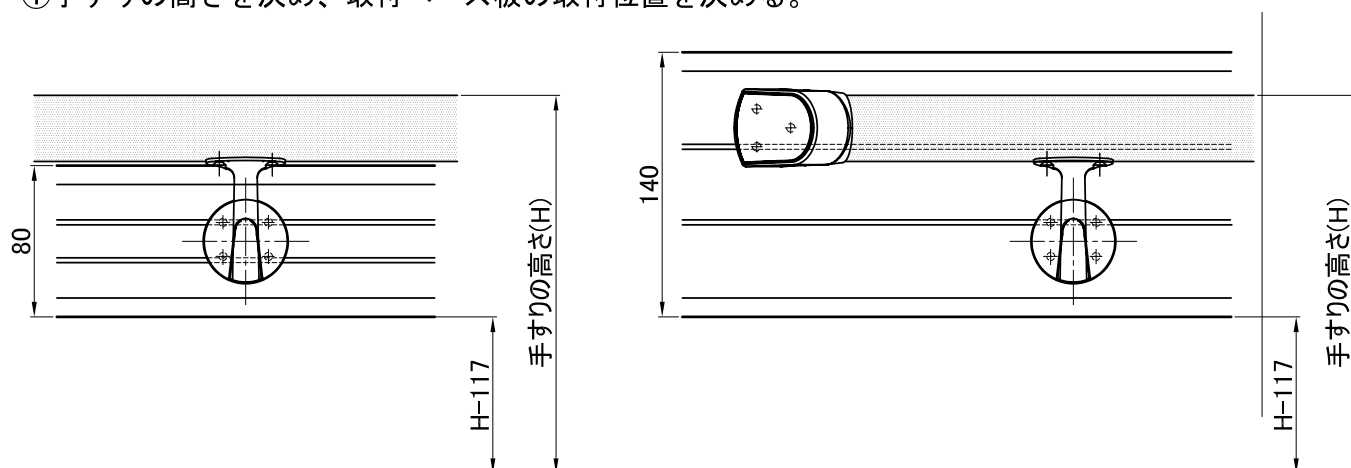

注意

取付ベース板の長さをカットした場合は、ささくれやバリ等は取り除いてください。断面にささくれやバリ等があると、取付ベース板用エンドの接着に支障が出る可能性があります。また、ささくれやバリ等があるとけがをする恐れがあります。




②柱固定用の通し穴(φ4キリ)を開ける。

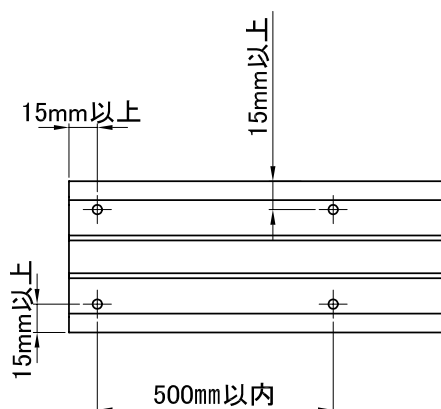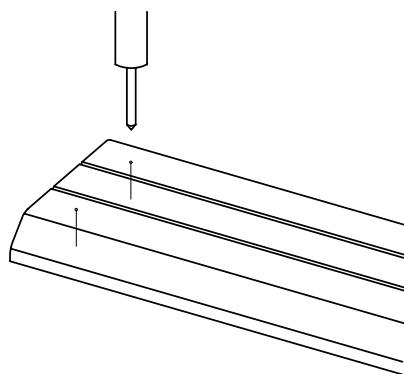

注意


端部のねじ位置は端から15mm以上離れた位置にしてください。

③連結ワッシャーに付属のねじを通して、取付ベース板を固定する。

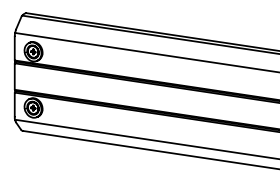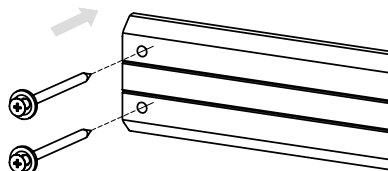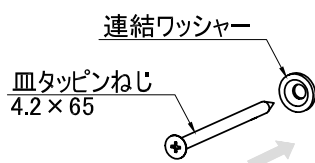

取付方法


④連結ワッシャーに連結キャップを取付する。

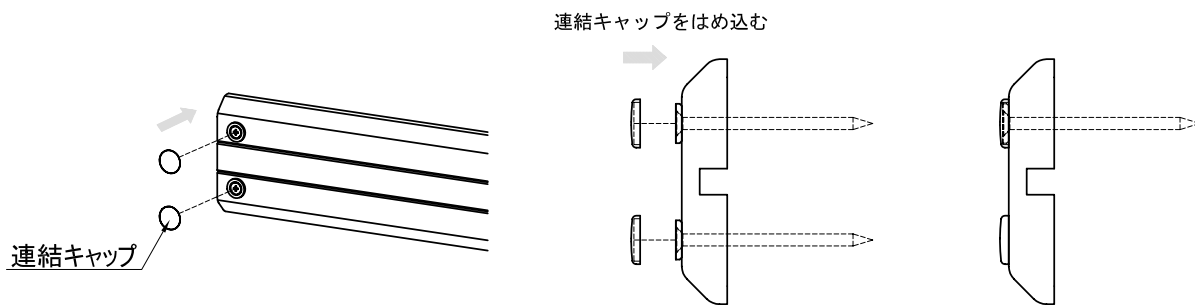

ねじを締め込み過ぎると、連結キャップが取り付けられない場合があります。

※取付箇所の状態により、ねじを斜めに取付した場合は、付属の連結キャップでねじ穴を隠すことができません。その場合は、別売の目隠しシールの購入をお願い致します。

⑤取付ベース板用エンドを接着剤(別途)で固定する。

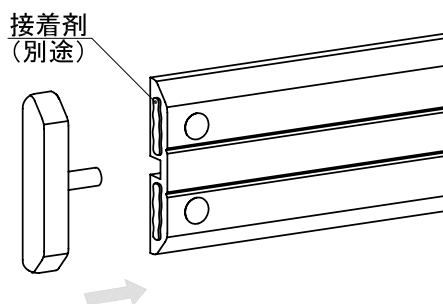

⑥手すりを取付する。

※手すりの取付に関しては、 $\phi 35$ -4000またはI型/L型に付属してある取付説明書を参照してください。


別売品

取付箇所の状態により、付属の連結キャップが取付できない場合は、下記が目隠しシールでねじ穴を隠してください。


品 番	商 品 名	入数	価 格
782-222	目隠しシール (ミディアム用)	26	1,300円
782-226	目隠しシール (ブラウン用)	26	1,300円

施工例


《I型縦仕様の場合》

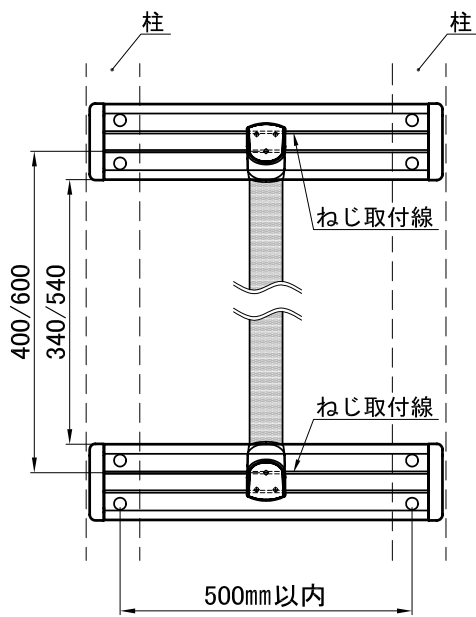


《L型の場合》

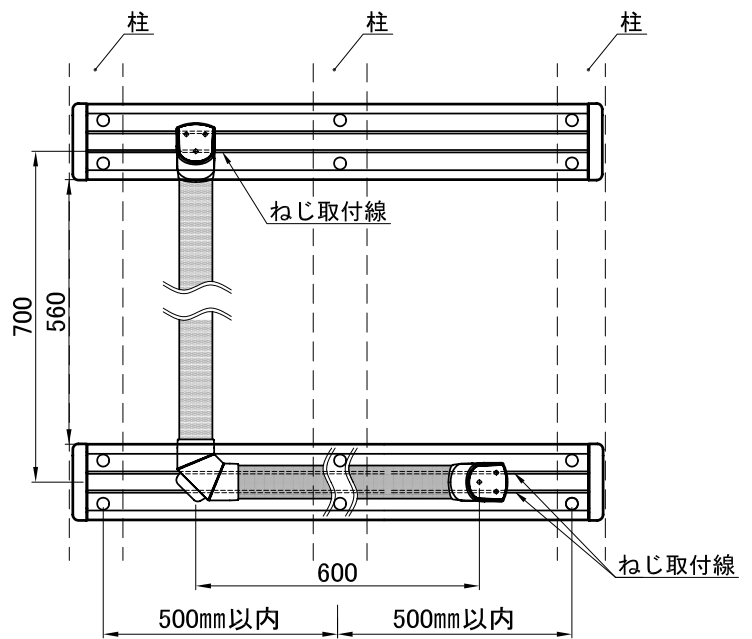

《縦仕様の場合》

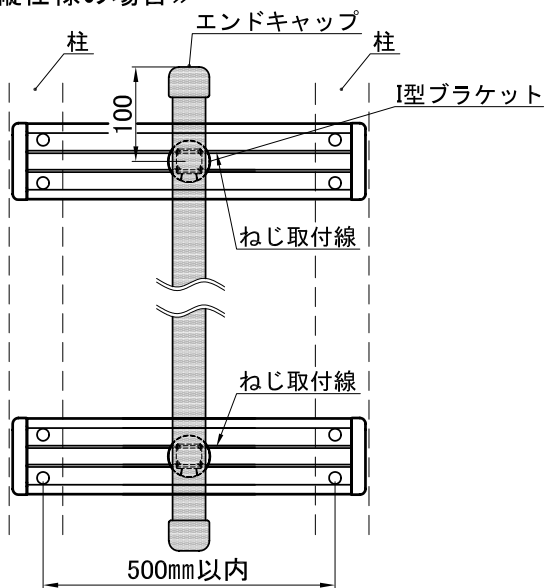

《連続手すりの場合》

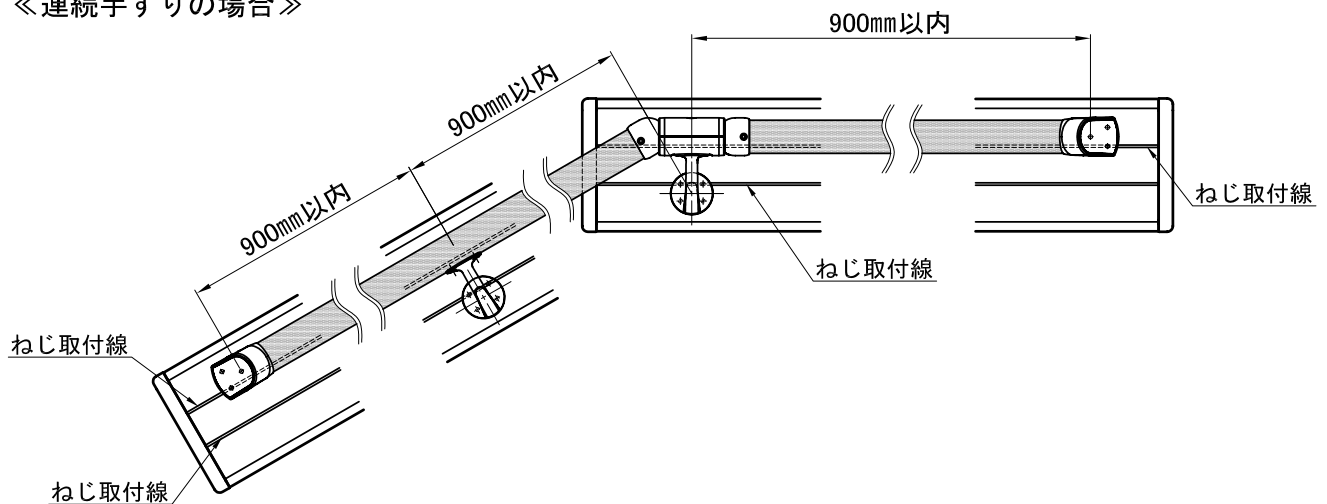

メモ

お手入れ方法

■日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。

汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。



注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、油類などの有機溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

■点検

定期的に点検を行い、ガタつき、ねじの緩み、破損、その他異常がないか確認してください。



注意

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。



本 社 工 場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<http://www.sk-shikoku.co.jp>